

PMTC スタートキャンペーン

期間 2012年6月21日～8月20日

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。

このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、

「**ハンディジェット PMTCスタートキャンペーン**」を企画いたしました。

期間中、下記対象商品それぞれ **特別価格** にてご提供いたします。

ぜひ、この機会をご利用ください。

数量限定

ワンランクアップのPMTCを提供するために



能動型機器接続歯面清掃用器具

ハンディジェット α
αメインチューブ用

キャンペーンコード 627806

能動型機器接続歯面清掃用器具

ハンディジェット C
カスタムエアー用
(カスタムエアー、カスタムエアーII、
スーパーカスタムタイプ)

キャンペーンコード 627807

能動型機器接続歯面清掃用器具

ハンディジェット MW4
ミッドウェスト4ホール用
(スクリュータイプ)

キャンペーンコード 627808

歯面を傷つけないバランスのとれた噴射パワー！

パウダーと水の
噴射口が異なるので
粉詰まりにくい

人間工学に
基づく120°の
コントラアングル

メンテナンスが
楽

水

パウダー

噴霧する
ポイントが
コントロール
しやすい

ハンディジェット

■標準価格 各 215,000円

と

患者さんにPMTCをはじめていただくきっかけに

**はがき
30枚**

■標準価格 3,000円



特に
おすすめしたい
患者さんへの
DMIに

**リーフレット
30枚×2セット**

■標準価格 30枚 1,000円



来院された
患者さんへ

合計220,000円分を
詰め合わせて

特別価格にてご提供！

おすすめ



**ハンディジェット
パウダー
PMTC 120g**

■標準価格 2,900円 627102

**特別価格にて
ご提供！**



**ハンディジェット
パウダー
リコール 200g**

■標準価格 4,200円 627103

**特別価格にて
ご提供！**



**ハンディジェット
パウダー
ミント 200g**

■標準価格 2,600円 627101

**特別価格にて
ご提供！**

診査・診断



光学式う蝕検出装置

ダイアグノデント ペン

う蝕の進行状況を
数値で見える化

■標準価格 ダイアグノデント ペン ディスプレイセット 398,000円 260200
 ■別売品 ダイアグノデント ペン ペリオ用プローブ 22,000円 260212

汎用歯科用照明器

マイクロラックス
トランスイルミネーター(光源は約30,000ルクス)
高輝度 LSP

■標準価格 29,800円 610001

口腔内カメラ

ペンスコープ VIS-41-D



ホワイトモード
2つのホワイトLEDにより、
明るく歯の観察が得られます。



ブルーモード
カクテル光線により、口腔内の
状態を映像として捉えます。

■標準価格 ペンスコープ VIS-41-D 298,000円 107271

■別売品
 ペンスコープ用HPディスプレイ 100入 1,200円 107287
 (ペンスコープ・ペンキョウ共用)
 ペンスコープPC接続ケーブル 6,800円 107289
 (VIS-41・27共用)

スケーリング



エアースケーラー

エアースルフィー 〈ライト付き〉

パワフルな歯垢除去と
バイオフィルムの除去に
ライト付エアースケーラー



■付属品

スケーリング ユニバーサルチップ



歯間清掃 ブラシチップ

エアースルフィー
チップスタンド※オートクレープ処理可能:
耐熱温度135℃

■標準価格

エアースルフィー P〈ライト付き〉 180,000円 107026


エアースルフィー 4H〈ライト付き〉 180,000円 107027

スケーラー

グレイシーキュレットエバーエッジ

器械では除去できないところに

用途に合わせて選択できる
充実ラインナップ

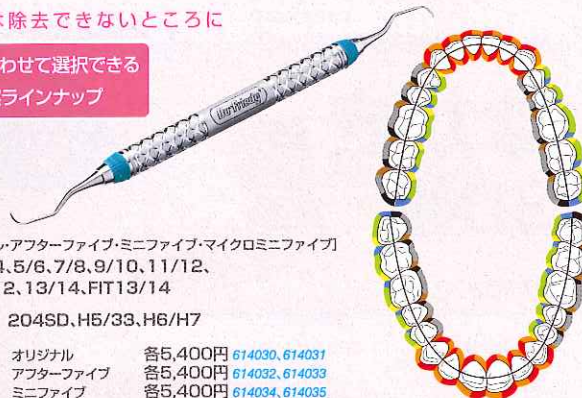

■規格

【オリジナル・アフターファイブ・ミニファイブ・マイクロミニファイブ】
 1/2、3/4、5/6、7/8、9/10、11/12、
 FIT11/12、13/14、FIT13/14

【衛生士用】 204SD、H5/33、H6/H7

■標準価格

オリジナル 各5,400円 614030、614031


アフターファイブ 各5,400円 614032、614033

ミニファイブ 各5,400円 614034、614035

マイクロミニファイブ 各5,400円 614036

衛生士用 各5,400円 614107、614108、614109

■グレイシーキュレットのブレード・シャンクの形状比較

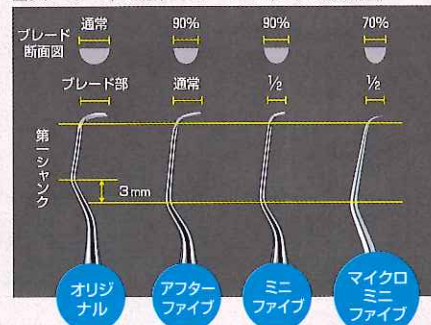

部位 適用規格

前歯部	1、3、5
前歯部及び小臼歯部	2、4、6
臼歯部の頬舌面	7
臼歯部の頬舌面	8
臼歯部の近心面	11、FIT11
臼歯部の近心面	12、FIT12
臼歯部の遠心面	13、FIT13
臼歯部の遠心面	14、FIT14

規格9/10について

9/10はシャンクの屈曲度が大きく、
通常では屈みにくい根面や根分岐部への
使用に適しています。

P M T C



歯磨カップ

P・CSプロフィーカップ



歯肉面や歯肉縁周辺の清掃

ソフト



矯正装置周囲など細かい部位の清掃

スリム



頑固なステインを効率よく清掃

ハード

■包装 各20個
■標準価格 各1,100円 260010

歯磨カップ

P・CSプロフィーポイント



■包装 20個
■標準価格 各1,100円 260011

歯科予防治療用ブラシ

P・CSプロフィーブラシ



■包装 20個
■標準価格 3,200円 260012

歯面清掃ペースト

Pクリーン ポリッシングペースト

化粧品

●スーパーコース (RDA275)

化粧品

●ファイン (RDA80)

化粧品

●FDファイン (RDA80)

ブリーチング対応ベア

基本ベア

粗研磨用

仕上げ研磨用

フッ素配合仕上げ研磨用

飛散が少なく、
洗浄も簡便な
清掃ペーストです。



■包装 40g
■標準価格
スーパーコース 1,200円 260001
ファイン 1,200円 260002
FDファイン 1,200円 260003

キャンペーン対象商品

アミノ酸のパウダーを使用した
クリーニングです。

能動型機器接続歯面清掃器具

ハンディジェット

■標準価格 215,000円 627001



甘い味の
パウダー

仕上がりが
ツルツル

スッキリ
リフレッシュ

痛くない!

キャンペーン対象商品

症例に合わせて選択できる
3種類のパウダー

歯面研磨材

ハンディジェットパウダー

P M T C

リコール

ミント



■標準価格
2,900円 627102




■標準価格
4,200円 627103



■標準価格
2,600円 627101

P M T C の施術の際にぜひご利用ください

穴あきタオル P・CSドレープ

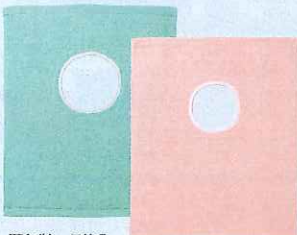

■包装 5枚入
■サイズ 40×34cm
■カラー パステルグリーン・パールピンク
■標準価格 5枚入 1,750円 260050



保護メガネ ホギー アイガード



■カラー

HOGIES	HOGIES	HOGIES
ブラック(B)	レッド(R)	ホワイト(W)
HOGIES	HOGIES	HOGIES
ゴールド(GO)	ブルー(BL)	ピンク(P)
HOGIES	HOGIES	HOGIES
グリーン(G)	パープル(PU)	イエロー(Y)
HOGIES	HOGIES	HOGIES
シルバー(S)	レッドピンク(RP)	イエローグリーン(YG)

■商品構成 アイガード(本体)1個、フレームサポートコード1個
■サイズ W150×H60×D160mm
■質量 約25g(フレームサポートコード含まず)
■標準価格 各3,800円 627180

使い分けよう3種類のパウダー

プラーク、バイオフィルムをスプレー噴射で除去
歯肉縁、インプラント周辺の清掃

ハンディジェットパウダー PMTC

仕上げ研磨
不要

主成分
グリシン
平均粒子径
25 μ m



ほのかに
甘い

■ハンディジェットパウダー PMTC 使用例

ラバーカップの代わりにハンディジェットでPMTC

ラバーカップでは届きにくい複雑な歯列、
歯間部、小窩裂溝でもスプレー噴射によるPMTCが行えます

複雑な歯列



Before



清掃中



After

小窩裂溝



Before



清掃中



After

歯肉縁周辺の清掃



歯肉縁周辺(ポケット長5mm
以内のケースで使用)に堆積
したプラーク、バイオフィルム
を除去します。



ノズルの位置は歯肉から
2mm~5mm離し、
30°~60°の角度を
つけます。

インプラント周辺の清掃



歯肉縁周辺の清掃と
同様にインプラント
周辺部位のプラーク、
バイオフィルムを除去
します。

矯正装置周辺の歯面清掃、軽微なステイン除去

ハンディジェットパウダー リコール

仕上げ研磨
不要

主成分
グリシン
平均粒子径
65 μ m



さわやかな
甘み

■ハンディジェットパウダー リコール 使用例



Before



清掃中



After

矯正装置のような到達困難な部位でも簡単に清掃できます。しかも、ブラケット、ワイヤーを装着したまま清掃が可能です。



Before



清掃中



After

ハンディジェットパウダーを用いてガンコなステインを除去後、リコールの際それまでの間に付着した軽微なステイン除去に用います。

主成分 グリシンについて

●グリシンとは

- アミノ酸の一種です。
- 非常に高い水溶性を持ち合わせています。
- 食品にも広く用いられている物質です。
- グリシン自体に甘みがあります。

●象牙質よりも
軟らかい

グリシンはエナメル質はもちろん象牙質
よりもモース硬度が低く、軟らかいという
特性があります。


材質	モース硬度
グリシン	~2
象牙質	2~2.5
炭酸水素ナトリウム	2.5
エナメル質	4~5.0

	主成分
ハンディジェットパウダー PMTC	グリシン
ハンディジェットパウダー リコール	グリシン
ハンディジェットパウダー ミント	炭酸水素 ナトリウム

●研磨効果の違い

研磨効果が高い
ガンコな汚れを
効率よく除去しやすい

研磨効果が低い
滑沢な表面の
仕上がりが

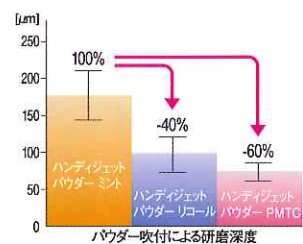

ガンコなステインを効率よく除去

ハンディジェットパウダー ミント

仕上げ研磨
必要

主成分
炭酸水素ナトリウム
平均粒子径
65 μ m



ミントの
香り

■ハンディジェットパウダーミント 使用例



Before



清掃中



After

ハンディジェットパウダーPMTC、リコールではなかなか除去できないガンコなステインを効率よく除去します。

「歯科衛生士」2009年12月号 PMTCに替わる歯面清掃器「ハンディジェットの有効性 別刷」がございます。ご入用の際は弊社営業担当者までご連絡ください。

製造販売 株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161
www.dental-plaza.com

株式会社 松本歯科商会
代表取締役 松本 渡
仙台市若林区木ノ下二丁目1番20号
TEL (293) 3588 (代表)