

# ニプロジェクト

5段階の注入速度と4種類の注入モードを搭載  
ガンタイプでコードレス仕様の軽量化デザイン

持ちやすく操作しやすいガンタイプ



# 充実した機能 持ちやすく操作がしやすい 軽量デザイン

操作性を  
追求した軽さ  
約**164g**

2規格の  
カートリッジに対応  
**1.0/1.8mL**

カートリッジが  
破損しないよう  
圧力を調整するなど  
**安全機能  
搭載**※


※動作インジケータが点灯します

## 4種類の注入モード

コンピューターによる制御機能により、自由度の高い注入が可能です。


### Manual / マニュアルモード

注入スイッチに加えた力に応じて、注入速度の調整が可能です。

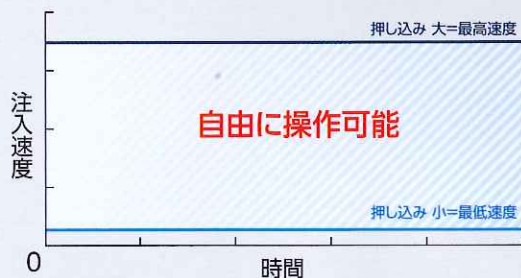


### One Shot / ワンショットモード

0.2mL注入後に停止します。

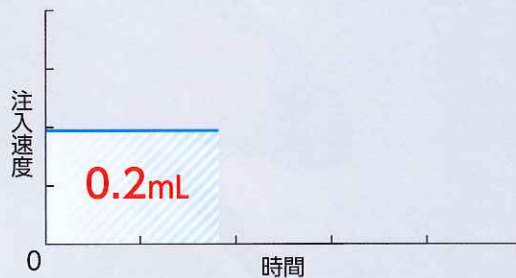

### Auto / オートモード

設定速度まで緩やかに速度上昇します。

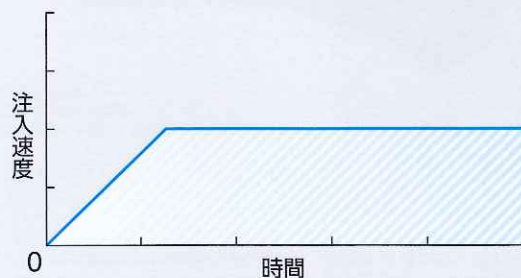

### Constant / コンスタントモード

設定速度まで速やかに速度上昇します。



カートリッジホルダ

注入スイッチ

加えた力に応じて、注入速度の調整が可能です。

プライミングスイッチ

注射針内のエア抜きや、プランジャーの清掃時に使用します。

## わかりやすい液晶ディスプレイ

プログラム設定・注入量がいつでも確認できます。

速度表示

設定速度を表示します。  
(5段階)

カートリッジ表示

カートリッジの設定を表示します。

バッテリー残量表示

バッテリー残量を表示します。  
(4段階)



注入圧表示

注入圧が表示されます。  
(6段階)

注入量表示

麻酔剤の注入量を表示します。  
(0.0~1.8mL)

モード表示

設定モードを表示します。  
(4種類)

## シンプルなインターフェース

カートリッジ設定スイッチ

1.0/1.8mLカートリッジを切り替えられます。

注入モード設定スイッチ

4種類のモードに切り替えられます。

注入速度設定スイッチ

速度を5段階に変更が可能です。

電源スイッチ

ON/OFFを切り換えます。

動作インジケータ

モーター動作/警告停止状態を表示します。



※注射針と麻酔剤はセットに含まれません

モーター動作の表示(青) 警告停止状態の表示(赤)



# 歯科麻酔用電動注射筒 ニプロジェクト

NIPROject

## ■商品構成



## ■仕様

|        |           |                    |                  |
|--------|-----------|--------------------|------------------|
| 電源     | 本体        | 電源種類               | ニッケル水素           |
|        |           | 電源電圧               | DC 2.4V          |
|        |           | 定格容量               | 730mAh           |
| 充電スタンド |           | 電源電圧               | AC 100V(50/60Hz) |
|        |           | ACアダプタ出力           | DC 6.0V          |
| 注入速度   | 速度目盛1     | 約0.00~0.33[mL/min] |                  |
|        | 速度目盛2     | 約0.33~0.50[mL/min] |                  |
|        | 速度目盛3     | 約0.50~0.67[mL/min] |                  |
|        | 速度目盛4     | 約0.67~0.83[mL/min] |                  |
|        | 速度目盛5     | 約0.83~1.00[mL/min] |                  |
| 外形寸法   | 本体        | W150×D25×H87mm     |                  |
|        | 充電スタンド    | W88×D50×H97mm      |                  |
| 質量     | 本体        | 約164g              |                  |
|        | 充電スタンド    | 約77g               |                  |
| 材質     | カートリッジホルダ | SUS304またはメッキ       |                  |

標準価格 **89,000円**    ニプロジェクトセット ロック式 515001  
 ニプロジェクトセット ネジ式 515002

## ■単品

ニプロジェクト専用カートリッジホルダ  
ロック式(2本入り)

標準価格 **9,060円** 515003

ニプロジェクト専用カートリッジホルダ  
ネジ式(2本入り)

標準価格 **9,060円** 515004



### 注意

歯科用局所麻酔剤の注入専用であり、それ以外の用途で使用しないこと。  
 本品は専門知識を有する歯科医師もしくは有資格者以外には使用しないこと。

- 販売名 ニプロジェクト
- 一般的名称 歯科麻酔用電動注射筒
- 医療機器認証番号 223AABZ00119000
- 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)/特定保守管理医療機器

株式会社 松本歯科商会  
 代表取締役 松本 渡  
 仙台市若林区木ノ下二丁目1番20号  
 TEL (293) 3588 (代表)

●標準価格の後の6ケタの数字は商品コードです。●掲載商品の標準価格は、2012年4月23日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。  
 ●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造販売 ニプロ株式会社  
 大阪府大阪市北区本庄西3-9-3 〒531-8510

販売 株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525  
 東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161

www.dental-plaza.com

●この印刷物は、環境にやさしい「植油性インク」「植林木使用紙」を使用しています。

PUB No. M207.1690-1-000.1205.64.000N-10