

NEW

Adhese® Universal

光重合型一液性ボンディング材 アドヒース ユニバーサル

発売記念 キャンペーン
2014.10.1 水 ~ 12.25 木

シンプル操作で、 安定した修復。

新登場の「アドヒース ユニバーサル」は、これ1本で様々なケースの歯面処理が完結します！ボンディング材としてだけでなく、デンチンシーリングや知覚過敏抑制に使用でき、全てケースが20秒の1層塗布で安定した結果が得られる、シンプルかつ多用途な一液です。

アドヒース ユニバーサル
ボトル(2本)

663721WW

5g×2本

1本 ¥15,000 × 2本 ▼

特別価格



新発売でお得な2本パック！
発売記念キャンペーン！

www.ivoclarvivadent.jp

Ivoclar Vivadent 株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24 | TEL 03-6801-1301 | FAX 03-5844-3657

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

Adhese[®] Universal

光重合型一液性ボンディング材 アドヒース ユニバーサル

発売記念 キャンペーン
2014.10.1 水 ~ 12.25 木

アドヒース ユニバーサルは、光重合型の一液性ボンディング材です。
シンプルな操作や保管方法で、術者や環境による差を抑え、安定した高い接着強度を得られます。

エッチングを問わないユニバーサル

エッチングの種類(セルフエッチ、セレクトイブエッチ、トータルエッチ)を問わず、
20秒の1層塗布でエナメル質・象牙質ともに高い接着力を得られます。

同じ塗布方法でシンプル操作

直接修復だけでなく、10 μ m未満の薄く均質な皮膜で間接修復にも使用でき、様々な
用途に同じ塗布方法、塗布時間で使用できます。

多用途な一液

ボンディング材としてだけでなく、デンチンシーリングや知覚過敏抑制材として、全て
同じ方法で使用でき、1本で多用途にお使い頂けます。

冷蔵保管不要

溶媒として水とエタノールを使用したアセトンフリーです。2~28℃で保管でき、臨床
において利便性と安定した結果を得ることにこだわった製品です。

キャンペーン中のボトルタイプに加え、口腔内に直接塗布できる、
便利で特長的な VivaPen もご用意しています。



エナメル質から塗布し、全体に20秒以上
こすりながら塗布する。



表面の液が動かなくなり、光沢が出るまで
エアードライする。



10秒間光照射 (光量500mW/cm²以上)

注文書 お申し込みはご利用の歯科商店様をお願いします。

製品番号	製品名	注文数
663721WW	アドヒース ユニバーサル ボトル(2本) ボトル 5g×2本	
663717WW	アドヒース ユニバーサル VivaPen スターターキット VivaPen 0.5mL×1本 カニューレ 10個、スリーブ 20枚付属	

医院名:	
〒 ご住所:	
TEL:	
ディーラー:	担当:

一般的名称: 歯科用象牙質接着材、歯科レジン用接着材料、歯科用知覚過敏抑制材料、歯科用シーリング・コーティング材/販売名: アドヒース ユニバーサル/ 認証番号: 226AGBZX00069000 / 管理医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24
TEL: 03-6801-1301 FAX: 03-5844-3657
www.ivoclarvivadent.jp
info.japan@ivoclarvivadent.com

CP0232L01

ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation