

日本歯科薬品株式会社

本社 山口県下関市西入江町2-5 〒750-0015 TEL 083-222-2221(代) FAX 083-222-2220
大阪営業所 大阪市中央区瓦町4-8-4 〒541-0048 TEL 06-6222-4090(代) FAX 06-6222-3950
東京営業所 東京都台東区柳橋1-23-4 〒111-0052 TEL 03-5822-5350(代) FAX 03-5822-5351
福岡営業所 福岡市中央区大名2-2-41-503 〒810-0041 TEL 092-735-6361(代) FAX 092-735-6362
[ホームページ] <http://www.nishika.co.jp/>

2015年 5月

注意!

水酸化カルシウム水性ペースト
カルシペックスⅡの使用方法に関して

「カルシペックスⅡ」、「カルシペックスブルーⅡ」について根尖孔からの溢出による重篤な有害事象が散見されております。

ご使用の場合は添付文書の記載内容ならびに以下の点にご留意ください。

【お知らせ文書 (改訂版)】**注意!****ご使用前に必ずお読み下さい。**

- 本材を根尖孔(瘻孔、穿孔を含む)より溢出させないで下さい。
- 本材は強圧で填入しないで下さい。

本材が根尖孔から溢出して上顎洞に迷入し、**重篤な有害事象**を起こしたとされる例が報告されています¹⁾。
また根管充填材の下顎管への迷入による下歯槽神経の知覚鈍麻や麻痺等の有害事象も報告されています^{2,3,4)}。
本材を適用する場合は、根尖と上顎洞あるいは下顎管との解剖学的な位置関係を十分に確認して下さい。

1) 皮膚病診療, 29, 409-412, 2007.
2) 日歯保誌, 27(1), 151-156, 1984.
3) 日本口腔外科学会雑誌, 46(1), 46-48, 2000.
4) 岐歯学誌, 30(3), 232-235, 2004.