


東北営業所限定企画

ディアーナ新規採用キャンペーン

キャンペーン期間：2021年5月10日～6月18日(数量限定)

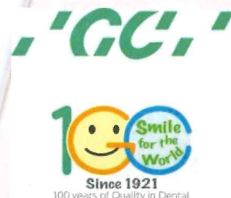

平素はジーシー製品をご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。
この度、東北営業所限定企画「ディアーナ新規採用キャンペーン」
を実施いたします。是非、この機会にジーシー製品をご用命下さい。

歯冠用硬質レジン ジーシー ディアーナ

オパークペースト『OA2、OA3、OA3.5』 3本1セットと

デンチン『DA3-C』 1本を

組み合わせ価格にてご提供！

対象
製品



●ディアーナ オパーク
OA2、OA3、OA3.5
希望医院価格●¥3,600/1本
ペースト2.0ml
管理医療機器
223AABZX00020000



『ディアーナ製品Webサイト』QRコードをスキャン！

キャンペーン
セット品



●ディアーナ デンチンDA3-C
希望医院価格●¥3,960/1本
ペースト3.3ml
管理医療機器
223AABZX00020000

①研磨できるオパーク！

ナノフィラー採用で物性向上
オパーク露出が心配される症例に

②セルフシャイニング効果！

毎日のブラッシングでツヤを維持！

③高強度なのにツヤ出しカンタン！

研磨時間短縮、作業効率のUP！

詳細は裏面にて

《注文方法》下記へFAXもしくはお取引販売店様へお渡しください
(株) ジーシー東北営業所 FAX022-791-7210

ご注文書

貴医院名・貴技工所名	対象製品	ご注文数	キャンペーンセット品
ご住所 〒 TEL ()	ディアーナ [®] -クOA2 2.0ml ディアーナ [®] -クOA3 2.0ml ディアーナ [®] -クOA3.5 2.0ml 各1本		ディアーナ デンチン DA3-C 3.3mL 1本
お取引販売店 株式会社松本歯科商会	ご担当者 株式会社 ジーシー 東北営業所 〒984-0051 仙台市若林区新寺 1丁目2-26小田急仙台東口ビル2F TEL：022-207-3370 FAX：022-791-7210		

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。
また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

ナノフィラーテクノロジーを 保険適用硬質レジンへ

特殊な表面処理と高密度な分散技術の
ナノフィラー技術を採用し、高い強度・物性を実現しました
研磨も容易で、摩耗も少ない、口腔内でツヤを維持する
『セルフシャイニング』効果を発揮する
保険用硬質レジンになります



ゼリーナ

保険適用硬質レジン
ジーシーディーナ

『ディーナ紹介動画』QRコードをスキャン！

ポイント




ジーシーディーナ


ナノサイズフィラーによる滑沢な面性状

だから
脱出し簡単

ナノハイブリッドタイプ:
ディーナ (イメージ図)

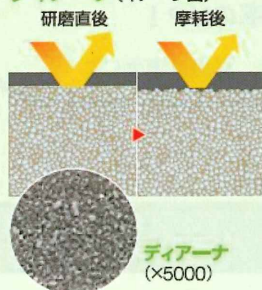

従来のMFRタイプ
(イメージ図)

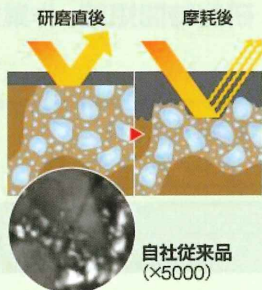

摩耗によりフィラーが脱落してもナノサイズの為、光沢が失われにくく、長期間滑沢な面を維持します。

研磨後は光沢があるものの、摩耗により大きなフィラーが脱落すると、凹凸ができ、光沢が失われやすくなります。

作業効率を向上させるナノフィラー採用のオペーク


オペークなのに
研磨ができる

従来品より垂れにくいため、凹部にペースト溜まりが生じにくく、均一な厚みで塗布することができます。また、各種物性も向上していますのでボディの薬盛層が薄くなりがちなマージン部で威力を発揮します。

オペークの操作性比較



オペークのタレ性比較

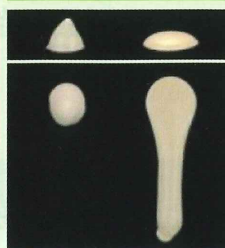

SEM像で見ると、しっかりとリテンションピースの間にオペークが入り込んでいるのが分かります。

ディーナ 自社従来品
上段: 30秒間放置後
下段: 60秒間垂直で保持後

ナノフィラーテクノロジーが「強度と耐摩耗性」を大幅にアップ

曲げ強度試験 ※1



硬さ試験 ※1



咬合摩耗試験 (10万回) ※2



ジャケットクラウン
にも使用できる
理工学的性質

ジャケットクラウン作製時の ワンポイント

サンドブラスト(SB)の圧力調整

クラウン内面の処理について
SBの圧力が強すぎるとオペーク層を削ってしまうので、
1.5気圧程度の弱圧をお勧めします。



研磨のしやすさは、ジーシーホームページより
動画でご確認いただけます！

ジーシーディーナ 検索