

接着性レジン系根管充填用シーラー

メタシール®Soft パースト

モノブロック根管充填キャンペーン

キャンペーン期間

2021年

7月21~

8月20日

数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。

このたび、「メタシール®Soft パースト モノブロック根管充填キャンペーン」を企画いたしました。

期間中、「メタシール®Soft パースト」を特別価格にてご提供いたします。


ぜひ、この機会をご利用ください。




② 術前X線写真




根管形成及び根管洗浄完了

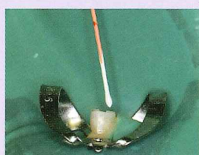


メタシールSoft パーストを
塗布したメインポイントを
根管に挿入

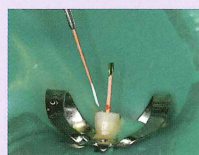

アクセサリポイントを挿入

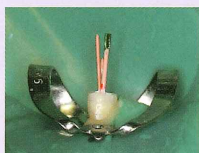

ガッタパーチャポイント
挿入完了

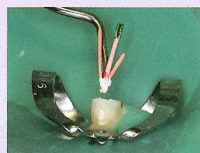

余剰ガッタパーチャポイントを
加熱除去し、断面を圧接



根管充填後の根管口部



根管充填直後の
X線写真

「接着」で
封鎖性が高い!

前処理不要で
簡単操作!

再根管治療が容易!

詳しくは裏面へ!

MetaSEAL
Soft
Paste



1根管分の目安
(原寸大)

←写真の量で
約150根管分
採取可能です。



冷蔵庫保管

歯科用根管充填シーラー
メタシール®Soft パースト

標準価格 9,300円

204610476

ベースペースト 2.5mL

キャタペースト 2.5mL

キャンペーン特別価格でご提供!

●販売名 メタシールSoft パースト ●一般的名称 歯科用根管充填シーラー ●医療機器認証番号 301AKBZX00045000 ●医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。 ●掲載商品の標準価格は2021年7月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。 ●お問い合わせは、お出入りのディーラーまでお願いします。

●ご使用に際しては、必ず製品添付の「添付文書」をお読みの上、正しくお使いください。 ●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。


モノブロック根管充填を可能にした 接着性レジン系根管充填用シーラー「メタシール®Soft ペースト」

「接着」で封鎖性が高い!



接着性モノマーの4-METAと親水性アミノ酸系重合開始剤により、湿潤した根管象牙質にも浸透・重合して良好な樹脂含浸層が形成されます。さらにガッタパーチャポイントとも接着し、根管象牙質からガッタパーチャポイントまでを一体化させたモノブロック構造で根管を緊密に接着封鎖し、細菌の侵入を抑制します。

根管象牙質への接着

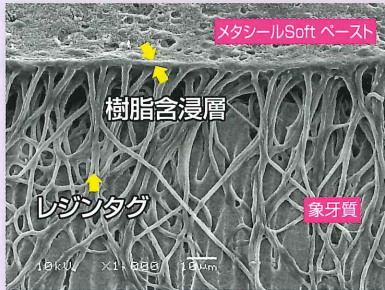



ガッタパーチャポイントへの接着



根管充填後の断面画像

歯質界面から重合開始

親水性アミノ酸系重合開始剤を配合することで、水分が残存する根管でも重合阻害されず、歯質界面から重合が開始されます。そのため、接着界面には重合収縮による間隙が発生しません。

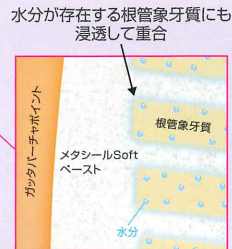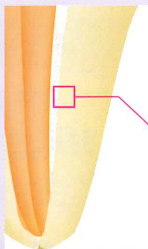

レジンなのに高湿潤環境でも硬化

水分量99%以上の食用寒天にて根管模型を作製し、メタシールSoft ペーストをエンドノズルにて充填後、ガッタパーチャポイントを挿入した。37℃の水中にて24時間保管後、メタシールSoft ペーストが高湿潤環境でもしっかりと硬化することが示された。



食用寒天の根管模型にメタシールSoft ペーストを充填



硬化したメタシールSoft ペーストを確認

(サンメディカル社試験による)

前処理不要で簡単操作!

押し出す



練る



移送



セルフアドヒーシブで前処理は不要

セルフエッチングのため前処理は不要です。また、次亜塩素酸ナトリウム処理後の歯面でも、親水性アミノ酸系重合開始剤の還元作用で良好に接着します。

ゆとりのある操作時間

室内環境光下で約10分使用可能です。口腔内では24時間以内に硬化します。



練和直後



10分後


良好なX線造影性

アルミニウム1000%相当以上*のX線造影性があるため、術後診断が明確にできます。
※JIS T6006 (2018) 準拠 (サンメディカル社試験による)



再根管治療が容易!

レジン系シーラーでありながら、完全硬化後も軟質な物性であるため、万が一の再根管治療時にも容易に切削除去が可能です。

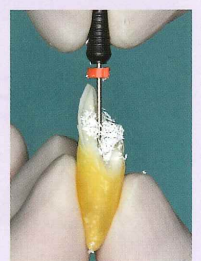

メタシールSoft ペーストの説明動画がご覧いただけます



左のQRコードをスマートフォンで読み取ってアクセスしてください。

製造販売 サンメディカル株式会社
滋賀県守山市古高町 571-2 ☎524-0044

発売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 ☎564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 ☎110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020 (フリーコール)
<歯科医療従事者様専用>
www.dental-plaza.com

株式会社 松本 歯科 商会
代表取締役 松本 渡
仙台市若林区木ノ下二丁目1番20号
TEL (293) 3588 (代表)