

# 新規採用 キャンペーン

特別価格にてご提供！  
対象期間 2021年10月21日～  
11月19日

## 歯科用印象、 模型用硬石ここの表面を 洗浄除菌



素材の形状に影響を与えず、  
安心して使用できる除菌洗浄剤

## SEAMES LN

ほとんどのメーカーの印象材や硬石ここの形状を損なうことなく、洗浄と除菌が行えます。特にウイルスに対して有効と言われているトリクロサンを配合しております。アルジネートだけでなく、シリコンや連合印象にもご使用いただけます。

### 【主成分】

- トリクロサン(イルガサン DP300)
- 高級アルコール系陰イオン界面活性剤
- ベタイン型両性界面活性剤 ● エタノール
- 容量 2ℓ 定価 ¥6,160
- 容量 4ℓ 定価 ¥11,880

### ■ シーマズLN のウイルスに対する試験方法

R-PHA 法にて10<sup>3</sup>以上のウイルス抗原力価を示した患者血清10例を用い、右記の方法にて各サンプルのウイルス抗原に対する試験を行った。

- ①ウイルス抗原陽性血清100mlにシーマズLN100mlを添加し、室温(20～25℃)に放置する。
- ②15分経過後、生理食塩水200mlを加え、直ちにウイルス抗原の検査を行う。  
機械はオーストラリアII-125(ダイナポット)を用いた。
- ③対照としては、血清100mlに生理食塩水300mlを加えたものを用いた。
- ④結果はCPMで求め、効果は便宜上CPMの低下割合で表した。  
計算(対照 CPM - 試料 CPM) / 対照 CPM × 100

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	単位 CPM
対照	*187	*166	18881	17005	18803	25802	17901	18015	20701	17787	
シーマズLN	174	184	2334	1633	5660	8698	7354	5515	2928	6970	
添加	7.0%	-9.6%	87.6%	90.4%	69.9%	66.3%	58.9%	69.4%	85.9%	60.8%	

\*ウイルス陰性血

### ■ シーマズLN の一般細菌培養試験

口腔中の一般細菌で汚染させた試料をシーマズLNに浸漬したものとそのままのものを標準寒天培地とブドウ糖ペプトン培地で培養しました。

		標準寒天培地			ブドウ糖ペプトン培地			
		1	2	3	1	2	3	
未処理	24hr	+	+	+	1day	-	-	-
	48hr	+	+	+	3day	+	-	-
	72hr	+	+	+	7day	++	+	+
シーマズLNに浸漬	24hr	-	-	-	シーマズLN 1day	-	-	-
	48hr	-	-	-	3day	-	-	-
	72hr	-	-	-	7day	-	-	-

※本剤は洗浄剤です。含有する除菌剤およびデータは、消毒を保証するものではありません。

### 【使用方法】

- 採取した印象を軽く水洗いした後水切りし、本剤を原液で15分浸漬してください。浸漬後は水洗いし充分水切りをして、石こうを注いでください。なお、すぐに石こうを注がない場合は流水ですすいでから、充分に水を切り、保湿箱にお入れください。
- ベースプレート、モデリングコンパウンド等のワックスやペースト印象材には使用できません。ご使用の際は、印象材と石こうの相性度合が洗浄剤によって変わる場合もありますのでテストによって確認してください。
- 洗浄液が減りましたら、新しい液を加えてください。本液は繰り返し使用できますが、汚れが目立つ場合は、全量新しい液に交換してください。
- 連合印象にもご使用いただけます。
- 浸漬洗浄の際は遮光のできるふた付き容器をご使用になれば便利です。

※製品の使用方法、注意事項など詳しくはカタログをご覧ください。

ジーシーグループ

[販売元]



## 株式会社 日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は

株式会社 松本歯科商会  
代表取締役 松本 渡  
仙台市若林区木ノ下二丁目1番20号  
TEL (293) 3588 (代表)