

フィットチェッカー ONE

新規採用 & ご愛用感謝キャンペーン



キャンペーン期間：2022.6/21~7/20 期間・数量限定

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「フィットチェッカー ONE 新規採用 & ご愛用感謝キャンペーン」を実施いたします。是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

フィットチェッカー ONE 補充用1-1キット 1函と
キャンペーンセット品 GCシリコンリターダー 3g & 付加型フィットチェッカー少量採取ノズル 2個 特別仕様 1セットを
組み合わせ価格にてご提供!

対象製品

義歯・クラウン・ブリッジの適合確認に!

付加型適合試験材(ホワイトシリコン)

フィットチェッカー ONE 補充用1-1キット

包装・希望医院価格 ●ベース43g(42mL) 1本、カタリスト57g(42mL) 1本、練和紙(No.1) 1冊

¥4,190 一般医療機器 13B1X00155000307



動画で確認!

盛りあげやすく、
しっかり広がる

圧をかけると
広がる

無圧だと
垂れにくい

被膜が一塊で
剥がしやすい

あたって
いる所が
確認できる

厚みを
識別しやすい

適度な透明性で、
微妙な厚みの違いが
容易に識別できます。



キロリ

ご注文書

キャンペーン期間：2022年6月21日～7月20日

貴医院名 _____

ご住所 〒 _____

TEL () _____

お取引販売店 _____

対象製品	キャンペーンセット品	ご注文数
フィットチェッカー ONE 補充用1-1キット 1函	GCシリコンリターダー 3g & 付加型フィットチェッカー 少量採取ノズル 2個 特別仕様 1セット	

キャンペーンセット品

[期間限定販売品 希望医院価格]
¥1,500

セット内容

GCシリコンリターダー 3g

包装・希望医院価格
●3g1本=¥460

1本

操作時間を
延長させたい時に



リターダーによる操作時間延長が可能です!

■少量採取ノズル 装着なし
(室温23度、湿度50%)

■少量採取ノズル 装着あり
(室温23度、湿度50%)

滴下数	操作時間	硬化時間
0	1分	2分15秒
3	1分20秒	2分45秒
5	1分40秒	3分30秒

滴下数	操作時間	硬化時間
0	1分	2分15秒
1	1分20秒	2分45秒
2	2分	4分

*ベース、カタリスト各5cm分練和した場合 *硬化時間は、23℃においての社内試験による測定値

付加型フィットチェッカー少量採取ノズル

2個
1セット



常に吐出量を
少なくしたい時に



※少量採取ノズル装着後の取り外しは不可となります。

株式会社 ジーシー

ご用命は

支店 ●東京(03)3813-5751
●大阪(06)4790-7333
●北海道(011)729-2130
営業所 ●東北(022)207-3370
●名古屋(052)757-5722
●九州(092)441-1286

株式会社 松本歯科商会
代表取締役 松本 渡
仙台市若林区木ノ下二丁目1番20号
TEL (293) 3588 (代表)