



接着性ガラスイオノマー系レジンセメント

ジーシー フジルーティング® EX Plus

色調●1色=ライトイエロー

包装・希望医院価格●1函：カートリッジ13.3g(7.2mL)2本、練和紙(No.22)1冊=¥11,800

歯科合適用ガラスポリアルケノエート系レジンセメント

ジーシー フジルーティング EX Plus

管理医療機器 303AKBZX00090000

「合着・接着」歯科用セメント適応症例

	メタル		ジルコニア		ハイブリッドレジン			セラミック(ニッケイ酸リチウム系・長石系)			CAD/CAM(ジンプロック)	
	インレー/ アンレー	クラウン/ ブリッジ	インレー/ アンレー	クラウン/ ブリッジ	インレー/ アンレー	クラウン/ ブリッジ	ベニア	インレー/ アンレー	クラウン/ ブリッジ	ベニア	インレー/ アンレー	クラウン
接着性ガラスイオノマー系レジンセメント ジーシー フジルーティング EX Plus	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
歯科接着用レジンセメント ジーシー ジーセム ONE neo	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ジーシー ジーセム ONE EM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

歯科接着用レジンセメント ジーシー ジーセム ONE 管理医療機器 228AKBZX00104000

歯科接着用レジンセメント ジーシー ジーセム ONE EM 管理医療機器 301AKBZX00021000

関連製品



すべてのCDカートリッジ製品にご使用いただけます。

ジーシー CDディスペンサーⅢ

包装・希望医院価格●1函：1個=¥2,500

歯科用充填・修復材補助器具 ジーシー CDディスペンサーⅢ

製造販売元 株式会社 シオダ

一般医療機器 09B2X00010G00063



簡単セットで1回の採取量が少量で経済的!

ジーシー CDディスペンサーⅢ エコストッパー

包装・希望医院価格●1函：1個=¥640

一般医療機器 09B2X00010G00063



CDディスペンサーⅢ エコストッパー

CDディスペンサーⅢのレバーに装着するだけでセット完了。

エコストッパー使用で
1クリック(インレー)
2クリック(クラウン)



■ フジルーティング EX Plus 1クリック採取量
体積比(Aペースト：Bペースト)

1.4：1.0

エコストッパー使用の場合


A
ペースト

B
ペースト

A
ペースト

B
ペースト


練和完了が
分かりやすい
2色のペースト

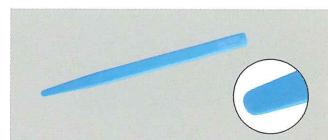

プラスチックヘラ No.1

色調●2色=青、白

包装・希望医院価格●1本(No.1)=¥130

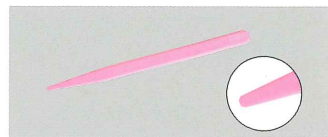

プラスチックヘラ No.4

色調●1色=ピンク

包装・希望医院価格●1本(No.4)=¥130

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2022年7月現在のものです。

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支店
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも
App Store Google Play
どちらもコチラのQRでOK!
推奨OSバージョンはiOS:13.7以上、Android:9.0以上です。



ED034G2206

ジーシー フジルーティング® EX Plus

接着性ガラスイオノマー系レジンセメント



Since 1921
100 years of Quality in Dental

タックキュア
光照射 **3秒**

余剰セメントを一塊のまま除去できます。

セット後 **2分45秒**で最終硬化

メタル
補綴装置に
最適!



New

Plus

GC Fuji Luting® EX Plus

保険適用

セメンテーションに時間を費やしていませんか？




口腔内セット後2分45秒で最終硬化

患者さんの回転率UP、ユニット清掃時間の確保

診療スタイルに合わせて
余剰セメントの除去方法を選択できます。



高い接着力と曲げ強度

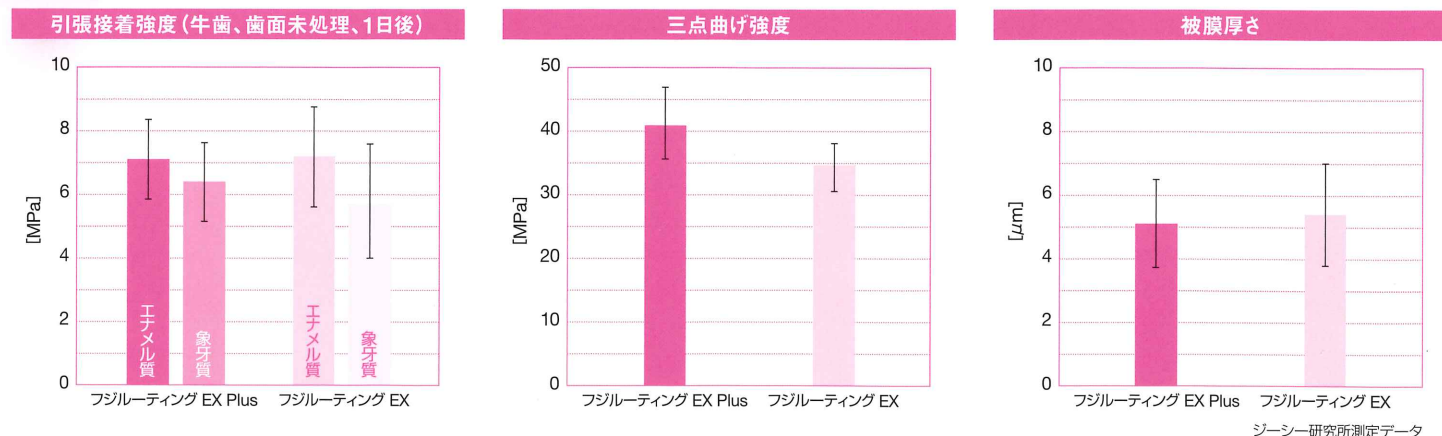

スムーズなセメンテーションで診療を効率良くスピーディに



余剰セメント除去までのチェアタイムを大幅に短縮

フジルーティング EX Plusは、
口腔内セット後2分45秒で最終硬化

空いた時間を
有効活用!!



材料	準備	練和	塗布	セット	余剰セメント除去	最終硬化
フジルーティング EX Plus (タックキュア光照射)	30秒	10秒	10秒	セット	余剰セメント除去まで60秒～90秒	口腔内セット後2分45秒
フジルーティング EX Plus (化学重合)	30秒	10秒	10秒	セット	余剰セメント除去まで約90秒	口腔内セット後5分
ルーティング VErse	30秒	10秒	10秒	セット	余剰セメント除去まで約90秒	口腔内セット後5分

タックキュア(光照射が有効な症例)



ジルコニアの装着にも!

