

キャンペーン期間

2022.7.1▶7.31【数量限定】

GC

フジルーティング® EX Plus 保険適用 発売記念キャンペーン



平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

この度、「フジルーティング® EX Plus 発売記念キャンペーン」を実施いたします。是非、この機会にご用命ください。

従来品
フジルーティングEX




タックキュア
光照射 **3秒**

余剰セメントを一塊のまま除去できます。

セット後 **2分45秒** で最終硬化

メタル
補綴装置に
最適!

New

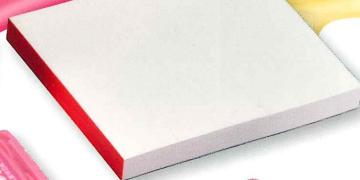

接着性ガラスアイオノマー系レジンセメント

フジルーティング® EX Plus

1 函

色調●ライトイエロー

包装・希望医院価格●1 函：カートリッジ13.3g(7.2mL)2本、
練和紙(No.22)1冊=¥11,800

歯科合着用ガラスポリアルケノート系レジンセメント
ジーシー フジルーティング EX Plus
管理医療機器 303AKBZX00090000

フジルーティング® EX Plus **1 函** と

キャンペーンセット品

でか見えセメントタイマー **1 個** +

CDディスペンサーⅢエコストッパー **1 個** を

組み合わせ価格にてご提供!!

キャンペーン
セット品

セメントの練和、余剰セメントの除去、
補綴物のセット時に大活躍!



でか見え
セメントタイマー

1 個

【期間限定販売品 希望医院価格】¥1,500
主な仕様●表示方式：液晶4桁表示、
設定時間：最小1秒・最大99分59秒、
アラーム時間：約30秒、
電源：DC1.5V(単4乾電池×1本)、
使用温度範囲：0℃~+40℃、
外形寸法・質量：D76×W82×H23.2mm
約75g(乾電池含む)
単4乾電池1本付属(モニター用)

はり付けられるマグネット!



立てられるスタンド付!



エコストッパーを使用で、1クリック(インレー)、
2クリック(クラウン)の適量(目安)が採取可能!

より
経済的に!

CDディスペンサーⅢ
エコストッパー


1 個

【包装・希望医院価格】1 函：1 個=¥640
一般医療機器 09B2X00010G00063

■ フジルーティング EX Plus 1クリック採取量

体積比(A:ペースト : B:ペースト) 1.4 : 1.0

エコストッパー使用の場合

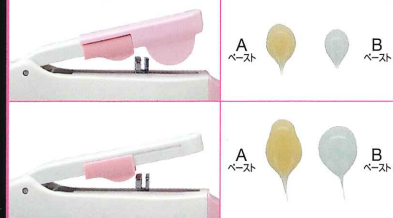

練和完了が
分かりやすい
2色のペースト

簡単セットで
1回の採取量が少量で経済的!



詳しい情報は裏面をご覧ください ➡

Plus

GC Fuji Luting® EX Plus

セメンテーションに時間を費やしていませんか？

練和10秒

しっかり練り込む

従来品「フジルーティングEX」と同様の練和感

タックキュア
光照射3秒

各面
光照射
3秒

余剰セメント除去

ポロツ

口腔内セット後2分45秒で最終硬化

患者さんの回転率UP、ユニット清掃時間の確保

診療スタイルに合わせて余剰セメントの除去方法を選択できます！

タックキュア光照射

各面3秒の光照射で
余剰セメントをポロツと除去

余剰セメントを
先に除去して空いた時間
を活用！！

化学重合

セット後1分～1分半で
余剰セメントをポロツと除去

余剰セメント
硬化までの空いた時間
を活用！！

空いた時間を有効活用！！

従来品「フジルーティングEX」と同様の
口腔内保持時間！

フジルーティング
EX Plus

光照射



準備	練和	塗布	セット
30秒	10秒	10秒	3秒

余剰セメント除去

口腔内セット後
2分45秒

最終
硬化

フジルーティング
EX Plus

化学重合



準備	練和	塗布	セット
30秒	10秒	10秒	3秒

余剰セメント除去まで
60秒～90秒

フジルーティング EX Plus 適応症例	
メタル	ジルコニア
インレー/アンレー	インレー/アンレー
クラウン/ブリッジ	クラウン/ブリッジ
○	○

※CAD/CAMレジンはブロック装着には、
ジーセム ONE ネオ、または、ジーセム ONE
EMをおすすめします。

キリトリ

ご注文書

キャンペーン期間:2022年7月1日～7月31日

貴医院名	
ご住所 〒	
TEL ()	
お取引販売店	

対象製品	キャンペーンセット品	ご注文数
フジルーティング EX Plus 1函	でか見え セメントタイマー 1個 + CDディスペンサーⅢ エコストッパー 1個	

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー

支店 ●東京(03)3813-5751
●大阪(06)4790-7333
●北海道(011)729-2130
営業所 ●東北(022)207-3370
●名古屋(052)757-5722
●九州(092)441-1286

ご用命は

株式会社 松本歯科商会
代表取締役 松本 渡
仙台市若林区木ノ下二丁目1番20号
TEL (293) 3588 (代表)