


## 臨床例 CAD/CAM冠装着



残存歯質をティースプライマーで前処理



CAD/CAM冠内面をM&Cプライマーで前処理

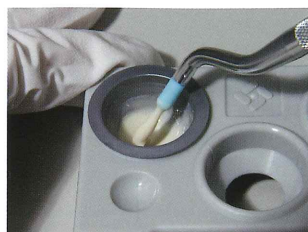


スーパーボンドEXの調製



スーパーボンドEXを移送



全周からセメントが流れ出ているのを確認して圧接

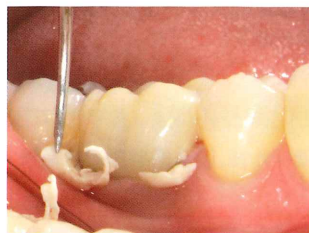

余剰セメントの除去(探針などで容易に一塊として取れる)



術後、頬側面観



術後、デンタルX線写真

## 包装・価格

### 歯科接着用レジンセメント スーパーボンドEX ユニバーサルセット

標準価格 ¥26,000

#### 【製品構成】

|                 |           |                 |             |
|-----------------|-----------|-----------------|-------------|
| キャタリストV         | 1本(0.7mL) | ダッペンスタンド(3穴)    | 1個          |
| クイックモノマー液       | 1本(10mL)  | ティスポッパペンカップ     | 20枚         |
| ポリマー粉末EXクリア     | 1個(3g)    | 計量スプーン Standard | 1本          |
| ポリマー粉末EXティースカラー | 1個(3g)    | ティスポ用筆柄(曲)      | 1本          |
| ティースプライマー       | 1本(3mL)   | ティスポチップ筆積L(ピンク) | 1ケース(10本入り) |
| M&Cプライマー A液     | 1本(2mL)   | ティスポチップ筆積LL(紫)  | 1ケース(10本入り) |
| M&Cプライマー B液     | 1本(2mL)   | ティスポチップ混和(青)    | 1ケース(10本入り) |
| スポンジ(L・S)       | 1箱        |                 |             |



#### ポリマー粉末



EXクリア 3g ¥2,800  
EXティースカラー 3g ¥2,800



EXラジオペーク 5g ¥3,560

#### 重合開始剤



キャタリストV 0.7mL ¥15,870

#### 液材



クイックモノマー液 10mL ¥7,450  
モノマー液 10mL ¥7,450

#### 前処理材



ティースプライマー 3mL ¥3,450



単品 A液/B液 各5mL 各¥4,100

#### 付属品

|                   |            |                 |           |
|-------------------|------------|-----------------|-----------|
| ティスポチップ筆積S(緑)     | 10本 ¥900   | ダッペンスタンド(3穴)    | 1個 ¥1,000 |
| ティスポチップ筆積L(ピンク)   | 10本 ¥900   | ティスポッパペンカップ     | 40枚 ¥800  |
| ティスポチップ筆積LL(紫)    | 10本 ¥900   | ダッペンディッシュ(陶器)   | 1個 ¥2,800 |
| ティスポチップ筆積3L(オレンジ) | 10本 ¥1,050 | スポンジ(L・S)       | 1箱 ¥930   |
| ティスポチップ混和(青)      | 10本 ¥900   | 計量スプーン Standard | 1本 ¥300   |
| ティスポ用筆柄(曲)        | 1本 ¥850    | 計量スプーン Small    | 1本 ¥300   |
| ティスポ用筆柄(直)        | 1本 ¥850    | スリチュラ           | 1本 ¥300   |
| ティスポスプーン          | 10本 ¥1,000 |                 |           |

歯科接着用レジンセメント スーパーボンドEX (管理医療機器) 医療機器認証番号 303AKBZX00055000  
 歯科接着用レジンセメント スーパーボンド (管理医療機器) 医療機器認証番号 221AABZX00115000  
 歯面処理材 ティースプライマー (管理医療機器) 医療機器認証番号 222AFBZX00100000  
 歯科セラミックス用接着材料 M&Cプライマー (管理医療機器) 医療機器認証番号 231AFBZX00022000  
 歯科用エッチング材 表面処理材レッド (管理医療機器) 医療機器認証番号 21600BZX00580000  
 歯科用エッチング材 表面処理材グリーン (管理医療機器) 医療機器認証番号 21600BZX00580000  
 歯科セラミックス用接着材料 スーパーボンド PZプライマー (管理医療機器) 医療機器認証番号 224AFBZX00102000  
 歯科金属用接着材料 V-プライマー (管理医療機器) 医療機器認証番号 20800BZX00452000

#### 歯科の未来を創造するサンメディカルテクノロジー



「TBB catalyst」は水分や空気中の酸素が存在する環境下においても高い反応性を示す重合開始剤です。



「4-META monomer」は、良質な樹脂含浸層を形成する接着促進モノマーです。スーパーボンド®をはじめ多くの製品に採用しています。

■ご使用に際しては、必ず添付文書をお読みの上、正しくお使いください。 ■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。 ■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。 ■標準価格・表示記載は2022年9月21日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

#### ■製造販売

**サンメディカル株式会社**

本社/〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 ☎077(582)9980

#### ■発売 株式会社モリタ

大阪本社/〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 ☎06-6380-2525 東京本社/〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 ☎03-3834-6161  
 お客様相談センター フリーコール 0800-222-8020 (医療従事者様専用)

スーパーボンドEXの情報がご覧いただけます。

www.sunmedical.co.jp

サンメディカル

検索

スマートフォンからのアクセスはコチラ→



歯科接着用レジンセメント  
スーパーボンドEX



SUN MEDICAL

45th Anniversary

使いやすくなった  
新感覚スーパーボンド  
Super-Bond EX



# 筆積法・混和法も室温※で利用できる 「スーパーボンドEX® ポリマー粉末」が登場！

## スーパーボンドEX ポリマー粉末



スーパーボンドのキャタリストV、クイックモノマー液、モノマー液が共通で使えます。

※周辺の温度により異なりますが、25℃以下での使用がおすすめです。



## 前処理にはこの2種類


歯質にはセルフエッチングプライマーの「ティースプライマー」、修復物にはすべての素材に使える「M&Cプライマー」を使用することで、前処理がよりシンプルになりました。

### 歯質

#### 歯質用のセルフエッチングプライマー ティースプライマー



#### ●歯質に対する引張接着強さ

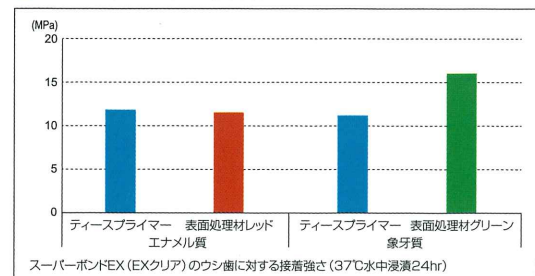


### 金属 セラミックス・レジンなど

#### すべての修復物に使えるマルチプライマー M&Cプライマー




#### ●修復物に対する引張接着強さ (サーマルサイクル10,000回後)

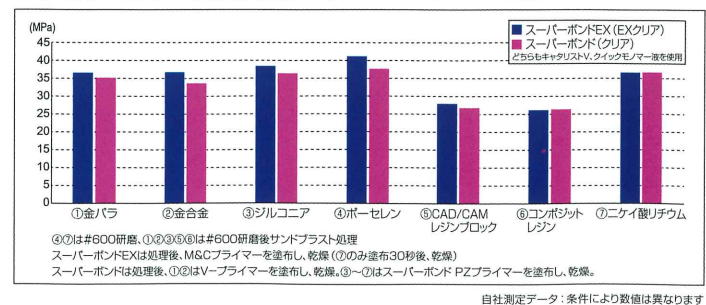

## 筆積法で使える！

### 筆積操作がしやすい

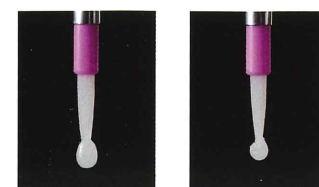

スーパーボンドEX  
ポリマー粉末  
EXクリア

スーパーボンド  
ポリマー粉末  
クリア

液なじみの良いポリマー粉末なので、ポリマー玉の採取が容易です。  
一度で大きなポリマー玉が採取できるため、筆積回数を減らすことも可能です。

### 操作可能時間と硬化待ち時間

#### 操作可能時間

クイックモノマー液とキャタリストVを混合してから**5分以内**に使用を終了してください。

#### 硬化待ち時間 (標準比率で使用した場合)

筆積操作後、咬合調整ができるまでの目安時間です。

| 硬化待ち時間 |
|--------|
| 37℃    |
| 約5分    |

こんな症例に  
おすすめ！



## 混和法で使える！

ダッペンの  
冷却不要！

### 適度なとろみで移送しやすい




23℃の室温であれば、  
混和後約30秒で適度な  
とろみ (ゆるい泥状) になるため、冠に移送しやすくなりました。




混和の状態を  
動画でご覧いただけます。

#### ●操作可能時間と状態の目安 (23℃) <標準比率にて混和>

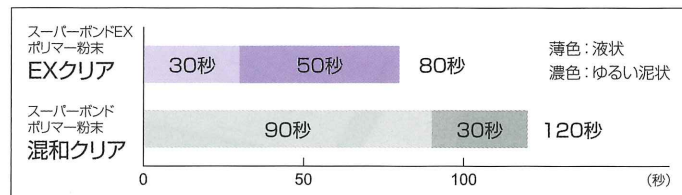


#### ●流動性の比較 (混和開始から40秒後) <標準比率にて混和>

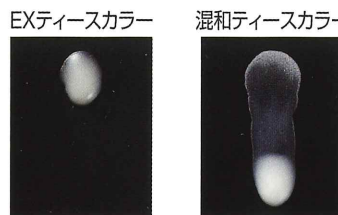

混和40秒後、垂直に立て5秒後に撮影。


流動性の低いEXティースカラーは単冠やインレー (アンレー) の装着に、流動性の高い混和ティースカラーはポストコアや連結冠の装着におすすめです。  
被膜厚さはどちらも約20~30μmです。  
※クイックモノマー液を使用

### 余剰セメント除去がしやすい

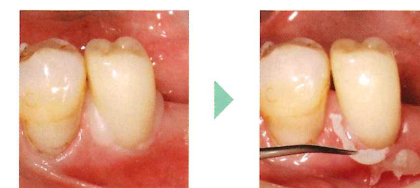

とろみがある状態 (ゆるい泥状) で使用すると、余剰セメントが粘膜表面や歯肉溝内へ垂れすぎずに留まるため、除去がしやすくなります。

### 良質な樹脂含浸層

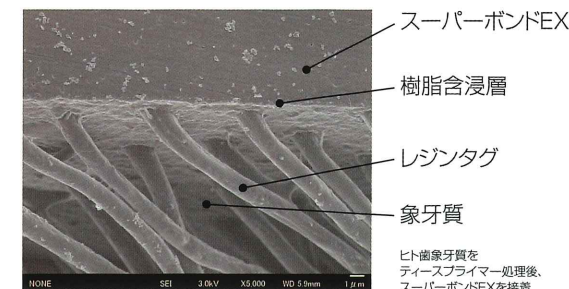

モノマー成分に含まれる4-METAが歯質に浸透して拡散し、良質な樹脂含浸層とレジンタグを形成します。

### 操作可能時間を延長したい場合は

標準比率よりもクイックモノマー液を1滴増やすことで、操作可能時間が延長できます。

| 粉液比       |         |                      | 操作可能時間*1 |       |      | 硬化待ち時間*2 |
|-----------|---------|----------------------|----------|-------|------|----------|
| クイックモノマー液 | キャタリストV | ポリマー粉末               | 21℃      | 23℃   | 25℃  | 37℃      |
| 4滴 (標準比率) | 1滴      | Standard (1.0)<br>1杯 | 約100秒    | 約80秒  | 約70秒 | 約7分      |
| 5滴        |         |                      | 約160秒    | 約100秒 | 約90秒 | 約10分     |

5滴でも使用できる！

※1 操作可能時間は周辺の温度環境により異なります。

※2 硬化待ち時間は、修復物装着後、咬合調整ができるまでの目安時間です。