

入れ歯

矯正用
リテーナー

マウス
ガード

トクヤマ リベースクリーナー

+ 患者様向け
リーフレット

キャンペーン

2022年 9.21 水 → 2023年 3.20 月

数量限定!

患者様向けリーフレット
(1錠付) 10枚

トクヤマ リベースクリーナー

6箱

組み合わせてご提供いたします!

5分で洗浄完了。一晚漬けでも大丈夫。
除菌率99.99%



*一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。*価格は2022年9月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。*数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

トクヤマ リベースクリーナー | キャンペーン注文書

貴歯科医院名

お名前

ご住所 〒

TEL

トクヤマ リベースクリーナー(32錠)6箱 [20702]
+ リーフレット(1錠)10枚

個

お届け歯科商店名

株式会社 松本歯科商会
代表取締役 松本 渡
仙台市若林区水ノ下二丁目1番20号
TEL (293) 3588 (代表)

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、ご本人様が拒否をされた場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社トクヤマデンタル

お問い合わせ・資料請求
インフォメーションサービス

本 社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

TEL 0120-54-1182

受付時間

9:00~12:00 / 13:00~17:00(土日祝日は除く)

Webにもいろいろ情報載っています!!

トクヤマデンタル




● 札幌 TEL 011-812-5690 ● 仙台 TEL 022-717-6444 ● 東京 TEL 03-3835-7201 ● 名古屋 TEL 052-932-6851 ● 大阪 TEL 06-6386-0700 ● 福岡 TEL 092-412-3240

トクヤマリベースクリーナーのご紹介


入れ歯に付着した菌は
12時間で約4,000倍に
増殖します！

付着

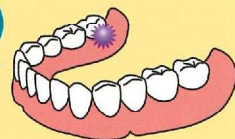

増殖

12時間後...

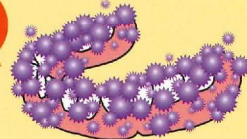

イラストはイメージです

だから

※【情報提供】二川 浩樹 先生 (広島大学大学院 教授)

毎日の洗浄が重要！

使用方法

150mL程度の
水に1錠入れてください。

1



ぬるま湯(40℃程度)
がより効果的。

すぐに入れ歯全体を
浸してください。

2



洗浄時間は5分程度。
(一晩漬け置きも可能。)

洗浄後は水でよく
すすいでください。

3



ひどい汚れは
スポンジなどで軽く
こするとより効果的。
残った洗浄液は捨てる。

汚れを素早く除去

★汚れがひどい場合には、浸漬後にスポンジ等で軽くこすると効果的です。

着色



洗浄前：
患者が着色の除去を希望



洗浄後：
5分浸漬、こすり洗い後

プラーク



洗浄前：
染色液によるプラーク染め出し



浸漬状態：
色素の浮きを確認



洗浄後：
5分浸漬、こすり洗い後

【写真提供】神奈川県横浜市 田中歯科医院 田中五郎先生

トクヤマリベースクリーナーの特徴

除菌率
99.99%※

カテキン配合



素早く洗浄



洗浄効果を高める
きめ細かな
泡立ち



食事を邪魔しない
控えめな香り



総入れ歯にも
部分入れ歯にも
使用可

※全ての菌を除菌できるわけではありません。

トクヤマリベースシリーズ、ソフリライナーシリーズで裏装された入れ歯の洗浄にもお使いいただけます。

歯科用 入れ歯洗浄剤

トクヤマリベースクリーナー

- 用 途：入れ歯、矯正用リテーナー、マウスガードの洗浄
- 内 容 量：6箱包装（ディスプレイ箱）
1箱32錠入り(2.8g×32)



株式会社トクヤマデンタル

〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

☎ 0120-54-1182 [受付時間 9:00～12:00/13:00～17:00(土日祝日は除く)]