


コンポジット3D フュージョン 審美修復キャンペーン

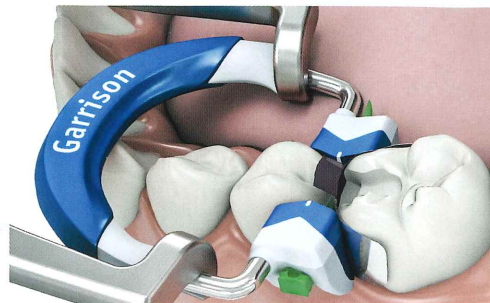

期間 2022年11月21日～2023年1月20日 数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。この度は、コンポジット3DフュージョンキットⅡスペシャルを含んだ「コンポジット3Dフュージョン審美修復キャンペーン」を企画いたしました。期間中、特別キットとしてコンポジット3DシステムフュージョンキットⅡスペシャルと前歯部修復用のヴァリストリップを詰め合わせて特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

コンポジット3DシステムフュージョンキットⅡスペシャル 特別キット

コンポジット3D システム フュージョンキットⅡ

標準価格 43,200円 206830003

3Dリテーナーフュージョン S 1入
フュージョンバンド 5種
・スモール ×5入
・エクストラスモール ×5入
・セミスタンダード ×5入
・スタンダード ×5入
・ラージ ×5入
リングフォーセップス フュージョン 1入
フュージョンウェッジ 4種 ×各10入
・エクストラスモール ×10入
・スモール ×10入
・ミディアム ×10入
・ラージ ×10入



と

3D リテーナー フュージョン L (グリーン) (1入)

標準価格 19,600円 206830004L

従来間接法による修復が推奨されていた大きなⅡ級窩洞でもコンポジットレジンによる直接修復が可能です。




フュージョンバンド 3種 各5枚

3Dカーブが強く、面積が広いので適合性が良く、歯牙形態にフィットしやすいです。




ヴァリストリップ 20枚入

標準価格 6,400円 206830157

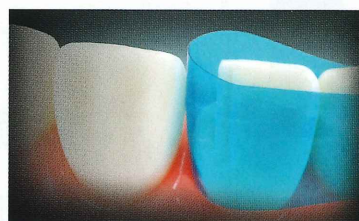

豊隆付きのストリップで自然なカーブを再現可能。患部の歯冠長と豊隆に合わせて使用できる設計により1枚でどのような歯牙にも対応できます。

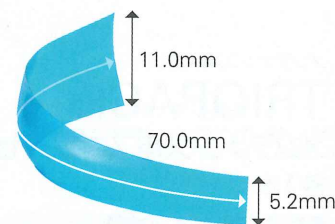

コンポジット3D デンタルマガジン抜き刷り 1部

詰め合わせて

特別価格にてご提供！

キャンペーンコード 206830805

●標準価格の後の数字は品目コードです。●掲載商品の標準価格は、2022年11月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。●お問い合わせは、お出りのディーラーまでお願いします。

製 造 ガリソン・デンタル・ソリューションズ

製造販売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

お問合せ お客様相談センター T 0800. 222 8020 (フリーコール)
＜歯科医療従事者様専用＞

www.dental-plaza.com

株式会社 松本歯科商会
代表取締役 松本 渡
仙台市若林区本ノ下二丁目1番20号
TEL (293) 3588 (代表)

コンポジット3Dシステム(臼歯部)



離間力と適合性がキーポイント
従来のリテーナーに比べ、歯間離間力と解剖学的形状による脚部の適合性が向上されたことで、より歯にフィットしやすかつ緊密なコンタクトポイントの再現が可能です。



直接修復の範囲を広げるリングLの追加
新しく追加されたリテーナーLにより従来間接法による修復が推奨されていた大きなⅡ級窩洞でもコンポジットレジンによる直接修復が可能です。

コンポジットレジン充填

症例紹介① [Ⅱ級小窩洞] フュージョン S(ブルー)を使用。



下顎左側第一大臼歯の窩洞形成を行う。



ラバーダム防湿し、コンポジット3Dシステムを装着する。




接着処理後、コンポジットレジン修復を行う。形態修正後、仕上げ研磨を行う。
(症例提供：田代歯科医院・田代浩史先生)

症例紹介② [Ⅱ級大窩洞] フュージョン L(グリーン)を使用。



上顎右側第二小臼歯の窩洞形成を行う。

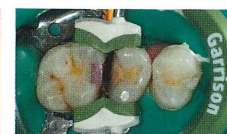

ラバーダム防湿し、コンポジット3Dシステムを装着する。



接着処理後、コンポジットレジン修復を行う。形態修正後、仕上げ研磨を行う。
(症例提供：田代歯科医院・田代浩史先生)

チェアサイドCAD/CAM

症例紹介③ [ビルドアップ&IDS]



スライスカット最深部に歯肉線マージンを確認。



ESフローHigh(クラレノリタケデンタル)でビルドアップと同時にIDSを行う。



MODインレー修復接合直前の状態。ヴァリストリップとフュージョンウェッジを使用。




光学印象後、セラミックインレーを作成し、接着した様子。
(症例提供：きたみ歯科医院・北道敏行先生)



ビルドアップ

歯肉線下では完全な接着が困難であり、歯質とセラミックの接着による構造上の一体化を期待できず、破折や離脱の原因となる。よって歯肉線マージンの位置をコンポジットレジンでビルドアップする。

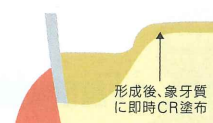

IDS

(Immediate Dentin Sealing, 即時象牙質シーリング)
形成後、露出した象牙質を即時に封鎖することにより、接着強度が向上し、さらに歯質の汚染防止にもつながる。

ヴァリストリップ(前歯部)

症例紹介④ [Ⅲ級窩洞] ヴァリストリップを使用。



窩洞形成をする。



ヴァリストリップを歯肉溝まで挿入し、ESフローを充填。隣接面形態を付与する。



形態修正し、仕上げ研磨をする。
(症例提供：協歯科医院・脇宗弘先生)

症例紹介⑤ [Ⅳ級窩洞] ヴァリストリップを使用。



シリコンガイドを製作後、窩洞を形成し、舌側の歯冠輪郭をESフローで作成する。



ヴァリストリップを歯肉溝まで挿入し、マージンとのギャップが生じないようESフローを充填。歯肉線上部の立ち上がり形態を付与する。



形態修正し、仕上げ研磨をする。
(症例提供：協歯科医院・脇宗弘先生)

販売名：コンポジット 3D リテーナー 一般的名称：歯科用マトリックスリテーナー クラス分類：一般医療機器(クラスⅠ) 医療機器届出番号：27B1X00109000233
販売名：コンポジット 3D システム 一般的名称：歯科用マトリックスシステム クラス分類：一般医療機器(クラスⅠ) 医療機器届出番号：27B1X00109000236
販売名：コンポジット 3D リングフォーセップス 一般的名称：歯科用マトリックスリングフォーセップス クラス分類：一般医療機器(クラスⅠ) 医療機器届出番号：27B1X00109000234
販売名：フュージョンバンド 一般的名称：歯科用マトリックスバンド クラス分類：一般医療機器(クラスⅠ) 医療機器届出番号：27B1X00109000330
販売名：フュージョンウェッジ 一般的名称：歯科用マトリックスウェッジ クラス分類：一般医療機器(クラスⅠ) 医療機器届出番号：27B1X00109000323
販売名：ヴァリストリップ 一般的名称：歯科用マトリックスバンド クラス分類：一般医療機器(クラスⅠ) 医療機器届出番号：27B1X00109000282

クリアフィル®メガボンド®2

内 容 プライマー(6mL)1本、ボンド(5mL)1本、
遮光皿(C)1個、遮光板(C)1個、
アプリケーターブラシ(ファイン<シルバー>)50本
標準価格 18,380円 202430270



販売名 クリアフィル®メガボンド®2
一般的名称 歯科用マトリックス用接着材料
歯科用マトリックス用接着材料(歯科用マトリックス用接着材料)
医療機器届出番号 227AB8ZX00114000
医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)

クリアフィル®マジスティ®ESフロー-

選べる3種類の
フロー性

内 容
レジン充填材
(各2.7g/1.5mL)

標準価格
各4,520円
202430321~202430325
202430301~202430312
202430341~202430344



販売名 クリアフィル®マジスティ®ESフロー
一般的名称 歯科用マトリックス用コンポジットレジン
医療機器届出番号 224AB8ZX00170000
医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)


クリアフィル®マジスティ®ES-2

ベーシックなベスト



内 容 レジン充填材
(各3.6g/2.0mL)
色 調 A1、A2、A3、A3.5、A4、
B1、B2、B3、B4、
C1、C2、C3、C4、D2、D3、
XW、W、OA2、OA3、KA6

標準価格
各3,500円 202430020~202430039

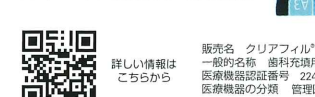

販売名 クリアフィル®マジスティ®ES-2
一般的名称 歯科用マトリックス用コンポジットレジン
医療機器届出番号 224AB8ZX00119000
医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)