

シェイク! ミックス ストーン 新規&ご愛用感謝キャンペーン

[キャンペーン期間] 2023 2.21▶3.20 数量限定

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「シェイク! ミックス ストーン 新規&ご愛用感謝キャンペーン」を実施いたします。
是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

「GC」



Shake! Mix
STONE

シェイク! ミックス ストーン
(ピンクまたはイエロー)
3kg 1函と

キャンペーンセット品

シェイク! ミックス ストーン
専用シェイカー (ピンク) 1個を
組み合わせ価格でご提供!!



超速硬石こう(模型用)

シェイク! ミックス ストーン

色調●2色=ピンク、イエロー

包装・希望医院価格●

1函: 3kg (1.5kgシンブルパック×2袋)=¥2,980

歯科用硬質石こうシェイク! ミックス ストーン 一般医療機器 13B1X00155000290

ピンクまたはイエロー
1 函



1 個

シェイク!
ミックス ストーン
専用シェイカー (ピンク)

包装・希望医院価格●1個=¥800

\\ バイブレータ不要! //

20秒シェイクして→流して→5分で完成!



How To Movie
公開中!



裏面もご覧ください!

キリトリ

ご注文書

キャンペーン期間: 2023年2月21日~3月20日

貴医院・技工所名	対象製品	キャンペーンセット品	ご注文数
ご住所 〒	シェイク! ミックス ストーン 3kg 1函 (ピンク) (1.5kgシンブルパック×2袋)	シェイク! ミックス ストーン 専用シェイカー (ピンク) 1個	
TEL ()	シェイク! ミックス ストーン 3kg 1函 (イエロー) (1.5kgシンブルパック×2袋)		
お取引販売店			

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー

支店 ●東京 (03) 3813-5751
●大阪 (06) 4790-7333
●北海道 (011) 729-2130
●東北 (022) 207-3370
●名古屋 (052) 757-5722
●九州 (092) 441-1286

ご用命は

株式会社松本歯科商会

宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594
E-mail info@matsumoto293.com


真空攪拌器やバイブレーター不要!

気泡が入らない! 5分*ではずせる石こう!

1

義歯の即日修理

今日中に義歯を直して渡してあげたい...

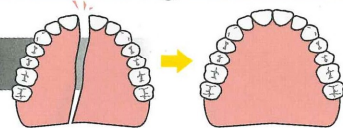

2

ホームホワイトニングやナイトガードの即日製作

患者さんに早めにマウスピースをつけてもらいたい...



3

TeCの製作


模型があったら適合の良い技工物ができるのに...



4

デジタル印象の調整用模型

適合・コンタクト調整を事前に...

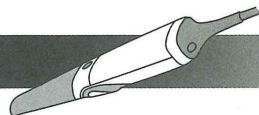

5

訪問診療

持ち運び時間が長いと寸法変化が心配...




印象採得後から
石こうを注ぐまでの
時間は、模型の
精度に影響します

印象採得直後に
シェイク! ミックスストーンを注入



+200μm
膨らんでいる
変化なし
縮んでいる
-200μm
(元の大きさに対して)

5時間後に硬石こうを注入
(アルジネートの状態で保管)

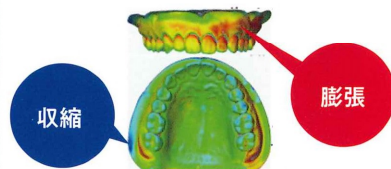

そんな時は
その場で!

20秒

シェイクして!

流して!

5分待つだけ!

使い方のコツ
動画はコチラ!



GCの

すぐれモノ

臨床に役立つ



「印象採得後、すぐに石こう模型を製作できる」
超速硬石こうシェイク! ミックスストーン
私の使いこなし編

(ばんだ歯科 須崎明先生)



※シェイカーで使用するアルジネート印象の場合 5分 シリコン印象の場合 7分

手練和、真空練和:アルジネート印象の場合 6分 シリコン印象の場合 8分

練和時に入った気泡が消える!

気泡が消えていく理由

シェイク直後




Anti-foaming Technology

特殊成分によって、石こう練和泥の表面張力を低下させて気泡を破裂させます。それにより、シェイク直後には見えている気泡が徐々に消えて無くなります。

【アンチフォーミングテクノロジーの仕組み】

●=特殊成分 ●=気泡 ●=石こう練和泥 ○=気泡の膜

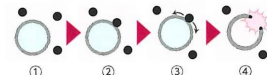

①特殊成分が気泡表面に侵入 ②表面張力が低下していく ③気泡が割れる

さらに、水のように流せて
気泡が消える!



物性比較表

	硬石こう ニューブラ ストーンII	超速硬石こう シェイク! ミックス ストーン	JIS T6600 タイプ4 (超硬質石こう規格)
初期硬化時間	11分	2分 20秒	-
操作余裕時間	8分	2分	-
取り外し時間	40分	5分	-
線硬化膨張 (120分後)	0.25%	0.13%	0~0.15%
圧縮強さ (120分後)	49 MPa	40 MPa	35 MPa以上