

アンジェラス ホーム

 angelus® HOME


10 %

16 %

医薬品含有歯科用歯面清掃補助材

2種類の濃度を有した、新しいホームホワイトニング材

フッ化ナトリウム・硝酸カリウム 配合

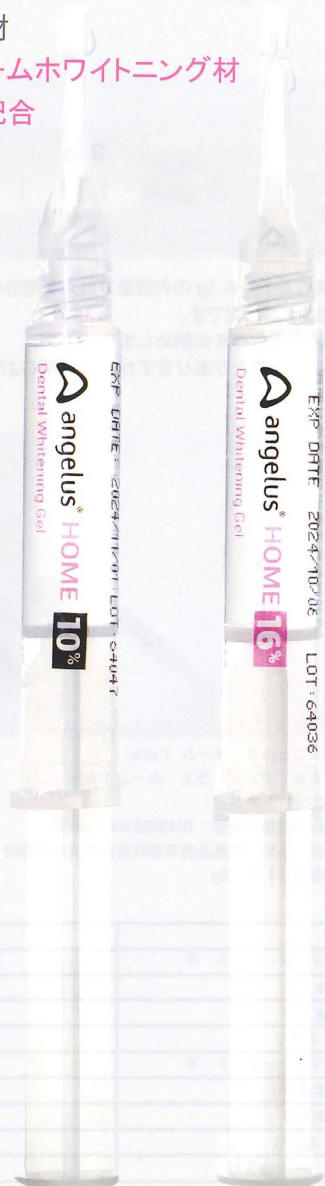

 angelus®

主な 10%と 16%の違い

	過酸化尿素濃度	1日の使用時間	使用期間
アンジェラス ホーム 10%	10%	2時間	2週間
アンジェラス ホーム 16%	16%	1時間 30分	2週間

シリンジの使用方法



ステップ①

アプリーケーターチップ先端部を折ります。
(※切り取ったパーツは、上下逆さまにする事でキャップになります)



ステップ②

※折り方によって、アプリーケーターチップ先端部が塞がってしまい、ジェルが出が悪くなる事があります。



ステップ③

キャップ突起部をアプリーケーターチップ先端部に押し込むように挿入してください。




ステップ④

ジェルをマウストレイに充填してください。




ステップ⑤

キャップを装着し保存して下さい。(冷蔵保存をお勧めします)

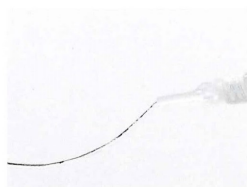

増粘剤でジェルが流れにくい為、2時間の使用でも快適です。

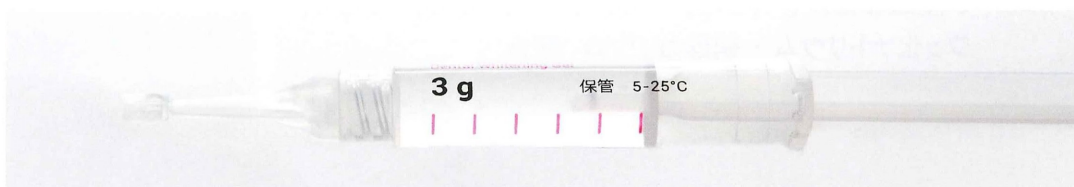

シリンジ内容量 3g と経済的です。※ 3g の内容量で最大 3 回分の使用が可能です。
※ 6 歯合計で 1 目盛り (0.5g) が目安です。
※ 本品の使用前、使用後は冷蔵保存をお勧めします。
※ 本品には気泡が混入していることがありますが、品質等には問題ありません。



アンジェラス ホーム 10%
販売名：アンジェラス ホーム
高度管理医療機器
医療機器承認番号：30100BZX00059000
一般的名称：医薬品含有歯科用歯面清掃補助材
内容量：1本 / 3g



アンジェラス ホーム 16%
販売名：アンジェラス ホーム 16%
高度管理医療機器
医療機器承認番号：30400BZX00204000
一般的名称：医薬品含有歯科用歯面清掃補助材
内容量：1本 / 3g



マウストレイシート
販売名：アンジェラス ホーム マウストレイ
一般医療機器
医療機器承認番号：27B1X00147000005
一般的名称：歯科用咬合スプリント
寸法：135mm × 135mm × 1.0mm

商品コード	製品名	標準価格
ANH0ME10ST	アンジェラス ホーム (10%) スターターセット ※	6,400
ANH0ME10/02	アンジェラス ホーム (10%) 2本入り	3,000
ANH0ME10/06	アンジェラス ホーム (10%) 6本入り	6,700
ANH0ME10/12	アンジェラス ホーム (10%) 12本入り	12,500
ANH0ME16ST	アンジェラス ホーム (16%) スターターセット ※	7,200
ANH0ME16/02	アンジェラス ホーム (16%) 2本入り	3,500
ANH0ME16/06	アンジェラス ホーム (16%) 6本入り	7,300
ANH0ME16/12	アンジェラス ホーム (16%) 12本入り	13,000
ANH0MET55	アンジェラス ホーム マウストレイ 5枚入り	1,800

※スターターセット内容：シリンジ 4本 マウストレイ 2枚 リーフレット (カラーチャート記録付)

詳しい説明は以下の
サイトからご覧ください。



※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は 2023 年 4 月消費税別です。

●お問い合わせは下記まで

株式会社 松本歯科商会
宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594

angelus[®]
Japan
072-657-7756

※対応時間 / 月～金 9:00～17:00
(土日祝祭日を除く)

●製造販売業：Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積 4-13-206