

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ビューティリンク SA	歯科接着用レジンセメント	管理医療機器 医療機器認証番号 304AKBZX00032000

包装・価格



ビューティリンク SA

9mL … ¥12,000

【内容】ペースト 9mL、スパチュラ 1、紙練板 1
【色調】3色(クリア、アイボリー、オパール)

X線造影性あり 歯科用合着・接着材料 I 17点

保管温度 1～25℃ 被膜厚さ 14μm

使用可能回数：120回

※ 第一小臼歯クラウン装着の場合

関連製品

CAD/CAM冠等、より高い接着強さを求める場合に前処理材としてお使いください



管理医療機器 認証番号
302AKBZX00026000

歯科用象牙質接着材
ビューティボンド Xtreme
1セット … ¥16,000

【内容】
ビューティボンド Xtreme 5.0mL
デイスボブラシ ファイン(ピンク) 50
松風Vティッシュ 25

- ・1本で各種被着体に接着可能なアドヒーズブ
- ・知覚過敏抑制や象牙質レジンコーティングにも



ビューティボンド Xtreme
トリプルパック
5.0mL×3本 … ¥38,000

お得な
トリプルパックも
ご用意

取扱い店

株式会社 松本歯科商会

〒984-0047 仙台市若林区木ノ下2丁目1-20
TEL 022-293-3588 FAX 022-293-3594

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

価格は2023年10月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ビューティリンク SA

無駄なく使える
ハンドミキシングタイプ

CAD/CAM冠や
金属冠など
各種補綴装置に

マルチに対応

前処理材
不要!※

※ CAD/CAM冠等、より高い接着強さを求める場合は、
窩洞または支台歯に対してビューティボンド Xtreme
による前処理を行う事を推奨します。

新規高反応性シランカップリング剤および松風独自の接着性モノマーの配合により、ガラスセラミックスやCAD/CAM用レジン材料をはじめとする各種補綴装置に対し高い接着強度が得られます。



ビューティボンド Xtremeの被膜厚さは薄く、液だまりになりにくい性状です。

どの材料に対しても同じ手順で使用可能※

操作を覚えやすく簡単に使用できます。

1 前処理

窩洞・支台歯の清掃
補綴装置のサンドブラスト処理

2 練和

ペーストを排出し10秒間練和
補綴装置に塗布

3 装着

1〜2秒間照射し、半硬化した余剰セメントを除去※1
マージン部を含む各方向から照射※2 (LED10秒間、ハロゲン20秒間)
マージン部を研磨、咬合調整

練和しやすいペースト性状

余剰セメントは簡単に除去可能

△ オペーク色に関する注意

本品のオペーク色は遮蔽性が高いため、お使いの際は下記の点にご注意ください。
 ※1 余剰セメントの除去について
 硬化前に綿球等で除去するか、2〜3分放置し、半硬化させて除去してください。
 周辺温度によって硬化状況は変わるため、探針等で硬化具合を確認してください。
 ※2 セメントの硬化について
 光照射だけでは硬化が不十分な恐れがあります。光照射後、5分間静置してください。

※ CAD/CAM冠等、より高い接着強さを求める場合は、窩洞または支台歯に対してビューティボンド Xtremeによる前処理を行う事を推奨します。

●臨床写真(CAD/CAMレジンブロック冠の補綴修復)

- 1 支台歯形成
- 2 支台歯の前処理
- 3 補綴装置の前処理
- 4 ペースト塗布・圧接
- 5 LED1〜2秒照射後余剰セメント除去
- 6 最終硬化

CAD/CAM冠等の接着強さが求められる症例には前処理を推奨

前処理不要ですが、行う事でCAD/CAM冠の内面処理地算が得られます(45点)

ビューティボンド Xtremeを塗布・エア乾燥(弱圧3秒→強圧)・光照射(LED5秒)

★ 十分なセメント操作時間を確保しつつもシャープに硬化し、チェアタイムの短縮を実現



色調は用途に応じて3色から 選択可能

クリア(C)	アイボリー(I)	オペーク(O)
透明性が高い色調 支台歯及び補綴装置の審美性が最大限に発現できます。	A2相当の色調 マージンラインが視認される症例に適しています。	A3相当の色調 金属または変色歯の遮蔽に。薄い被膜でも高い遮蔽性を示します。

Point 遮蔽性の高いオペーク色


金属支台歯模型 オペーク無しで試適 オペークで接着

暗く沈んで見える 支台歯の色をマスキング

補綴装置装着後のことも考えたいから


口腔内環境の健全化をサポートする S-PRGフィラーを含有

ビューティリンク SAに含まれるS-PRGフィラーは、松風が独自に開発したバイオアクティブなフィラーです。6種類のイオンリリースにより、右に示すような特長を有します。

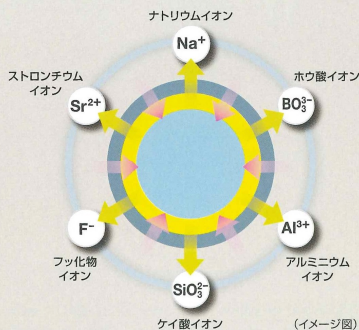

特長 1


イオンリリース & フッ化物リチャージ機能
 S-PRGフィラーからフッ化物をはじめとする6種類のイオンが持続的にリリースします。また、フッ化物含有歯磨きジェルを使用することで、口腔内のフッ化物イオンをリチャージします。

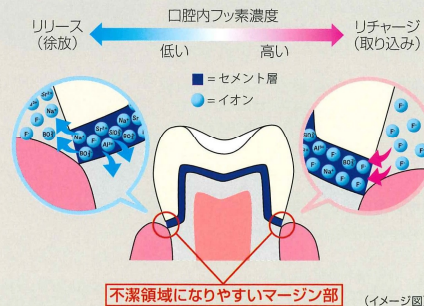

特長 2

酸中中和能の発現

S-PRGフィラーの働きにより、周囲環境を中性領域に移行させます。

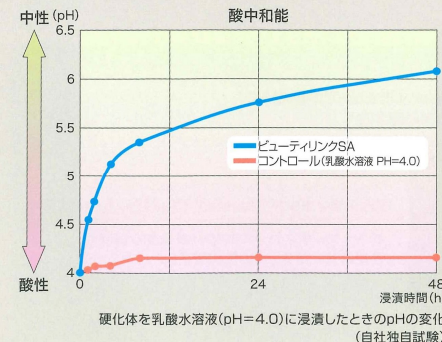

特長 3

抗ブラーク付着性(学会報告)

日本歯科保存学会にて下記内容が報告されています。

口腔内におけるブラーク形成状況の観察(24時間ブラッシングなし)

S-PRGフィラー配合コンポジットレジン(ビューティフィルⅡ等)の表面はだ液と接触することによって、マテリアルフィルム層ができ、これがコンポジットレジン表面への細菌の付着および増殖を抑制し、成熟したブラークを形成しにくくすると報告されています。また、この層はブラッシング等により脱離するもの、再度だ液との接触によって再形成され、持続的にブラーク形成を抑制するといわれています。

S-PRGフィラー未配合自社コンポジットレジン ビューティフィルⅡ (S-PRGフィラー配合)

(参考: 朝日大学 歯学部歯科保存学分野/第117から123回日本歯科保存学会報告)