

キャンペーン期間 2023年11月21日(火)～
2024年 1月19日(金)まで

Tokuyama

高純度安定型次亜塩素酸水

トクヤマデントジア キャンペーン

希釈用原液 2L

① 幅広い菌やウイルスに有効 ② 素早く簡単除菌 ③ 様々な用途に対応



セットにして
ご提供

拭拭用の除菌液が
ボトルの目盛線で
簡単に調製できます。

トクヤマ デントジア 標準医院価格
希釈用原液 2L ￥4,100

希釈用 スプレーボトル 標準医院価格
￥600

*一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。*価格は2023年11月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。*数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

トクヤマ デントジア 2L キャンペーンパック 注文書

貴歯科医院名

お名前

ご住所 〒

TEL

()

トクヤマデントジア

[41303]

希釈用原液 2L キャンペーンパック

セット

お届け歯科商店名

株式会社 松本歯科商会

〒984-0047 仙台市若林区木ノ下2丁目1-20
TEL 022-293-3588 FAX 022-293-3594

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、ご本人様が拒否をされた場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社トクヤマデンタル

お問い合わせ・資料請求
インフォメーションサービス

0120-54-1182

本 社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

受付時間

9:00～12:00/13:00～17:00(土日祝日を除く)

Webにもいろいろ情報載っています!!

トクヤマデンタル

検 索

●札幌TEL011-812-5690 ●仙台TEL022-717-6444 ●東京TEL03-3835-7201 ●名古屋TEL052-932-6851 ●大阪TEL06-6386-0700 ●福岡TEL092-412-3240

1 幅広い菌やウイルスに有効

「トクヤマ デントジア 希釈用原液」は高純度安定型の弱酸性次亜塩素酸水です。院内環境の衛生対策として、幅広い菌やウイルスの除菌に有効です。


2 素早く簡単除菌

【菌・ウイルスに対する作用時間と除菌率】

	細菌・真菌	ウイルス
100ppm 10倍希釈	10秒 >99.99%	10秒 >99.99%

試験機関：一般財団法人 北里環境科学センター
試験品：「トクヤマ デントジア」
試験方法：試験品に直接菌液・ウイルスを接種する方法

最短10秒で簡単除菌！

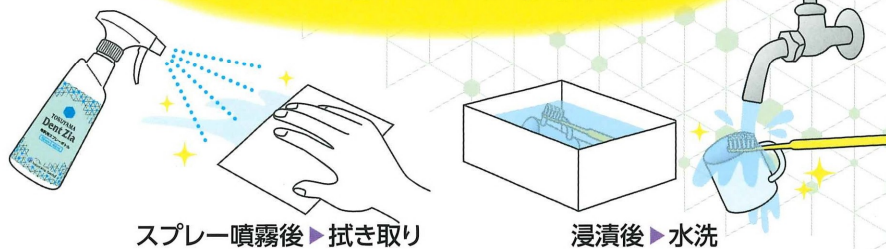

3 様々な用途に対応

推奨希釈倍率：原液 5倍 10倍



ユニットまわりの除菌に



キャビネットの除菌に



待合室のソファや
テーブルの除菌に



保護メガネの除菌に



歯ブラシやTBI時の
ツールの除菌に



マウスガードや
ホワイトニングトレーの除菌に



スパチュラや
ツール類の除菌に



トイレの除菌・消臭に



往診時の
ツール類の除菌に



スリッパの除菌・消臭に



タオルや布類の
除菌・消臭に



床や壁の除菌に



吐瀉物処理時の除菌に



次亜塩素酸水対応
噴霧器で室内の除菌に

▶ 希釈方法


《5倍希釈》

希釈専用ボトル「トクヤマデントジア希釈用ボトル」は側面に線（エンボス）*が入っています。下線まで原液を入れ、上線まで水道水で希釈します。

*説明のため赤色で示しています。

（注）希釈した液は、1ヶ月を目安に使い切ってください。

希釈ボトルは、高温および直射を避け、冷暗所に保管してください。また、1ヶ月以上経過した希釈液は廃棄して新たな希釈液をお作りください。

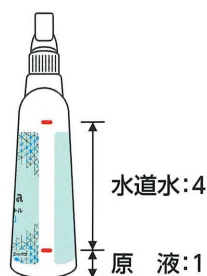

▶ 除菌効果について

次亜塩素酸水は、その製法にかかわらず、新型コロナウイルスに対する有効性について発表がありました。[NITE（独立行政法人製品評価技術基盤機構）令和2年6月26日報告資料]
弊社では、大腸菌、MRSA、ノロウイルス、肝炎ウイルス、インフルエンザウイルス、カンジダ菌、結核菌などを用いて第三者機関（北里環境科学センター）において試験を行っています。

▶ 手指消毒について

デントジアは手指消毒を使用目的としておりませんので、効果の検証は行っておりません。

【使用上の注意】 ●他の製品との併用は避け、本品は単独でお使いください。●使用期限は未開封時冷暗所に保存の場合、製造より1年ですが、開封後は3ヶ月を目途に使い切ってください。●掃拭用途でスプレーボトルに希釈した除菌液は1ヶ月を目途に使い切ってください。●スプレー噴霧後は拭き取りを、浸漬後は水洗をしてください。●金属への腐食や樹脂・ゴム・布等の変色を起こす可能性があります。●塩素に対しアレルギーのある方は使用をお控えください。

株式会社 トクヤマデンタル

インフォメーションサービス

0120-54-1182 受付時間 9:00~12:00, 13:00~17:00(土日祝日を除く)

札幌 TEL 011-812-5690 仙台 TEL 022-717-6444 東京 TEL 03-3835-7201
名古屋 TEL 052-932-6851 大阪 TEL 06-6386-0700 福岡 TEL 092-412-3240

ホームページ <https://www.tokuyama-dental.co.jp>

■ ご用命は



株式会社 松本歯科商会

〒984-0047 仙台市若林区木ノ下2丁目1-20
TEL 022-293-3588 FAX 022-293-3594