

歯科用知覚過敏抑制材料

ティースメイト® ディセンシタイザー ご愛顧感謝キャンペーン

【実施期間】

2024.5.21>>>6.20

数量
限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、

『ティースメイト® ディセンシタイザーご愛顧感謝キャンペーン』を企画いたしました。期間中、下記対象商品を **特別価格** にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。




ティースメイト® ディセンシタイザー 1-1セット

標準価格 8,190円 202410211

■セット内容 粉材(4g)×1本、液材(3.2mL)×1本
付属品 混和皿(B)×1個、計量スプーン(TD)×1本、アプリケーションブラシ(ファイン(シルバー))×50本
販売名 ティースメイト® ディセンシタイザー
一般名称 歯科用知覚過敏抑制材料
機器の分類 管理医療機器 (クラスⅡ)
医療機器認証番号 224ABBZ00014000

特別価格にてご提供!!

使用ステップ (ご使用の際には必ず本品の電子添付文書をお読みください)

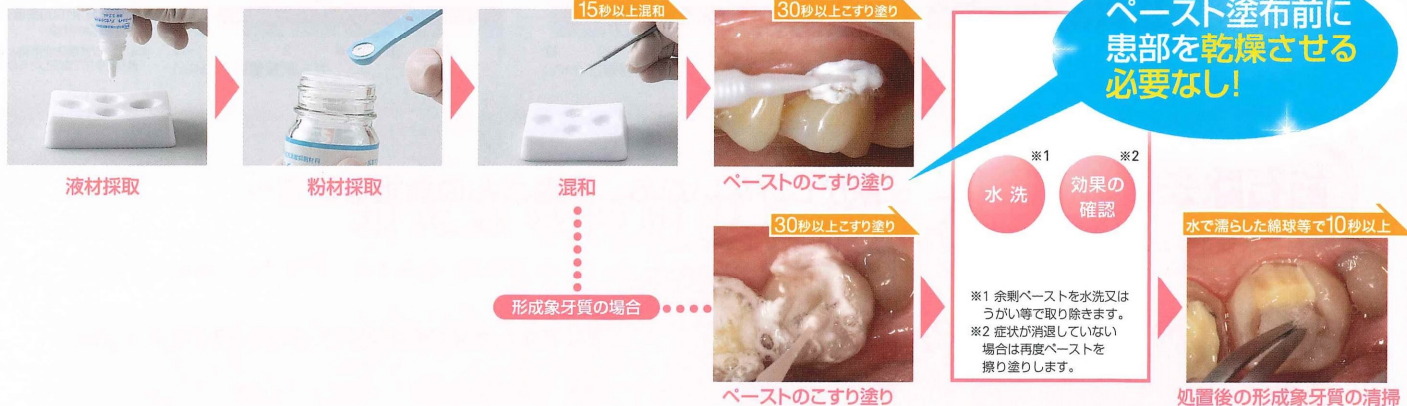

関連商品のご紹介

ティースメイト® APペースト

■1本(30g) 標準価格 9,240円 202410300

販売名 ティースメイト® APペースト
一般名称 歯科用知覚過敏抑制材料
機器の分類 管理医療機器 (クラスⅡ)
医療機器認証番号 226ABBZ00010000



混和不要ですぐに使える便利なペーストタイプ

- ・SRP後やホワイトニング後の知覚過敏に使用しやすい
- ・フッ化ナトリウム配合(950ppm)



友だち追加は
こちらから

クラレノリタケデンタル LINE公式アカウント

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800. 222 8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com

特別価格のお問い合わせについては、お出りのディーラーまでお願いします。

●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタル株式会社もしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2024年5月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

株式会社 松本歯科商会

宮城県仙台市若林区本ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594

歯科用知覚過敏抑制材料


ティースメイト® ディセンシタイザー

その刺激から歯を守


あえての粉液 ～ハイドロキシアパタイトで開口した象牙細管を封鎖！～

余計な成分を添加させていないことで、高濃度のHAp(ハイドロキシアパタイト)化が可能に！
ハイドロキシアパタイトに転化した封鎖物が象牙細管に留まり、封鎖性・耐久性ともに優れています。

象牙細管の封鎖状態

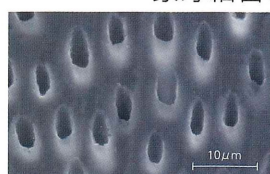


塗布前

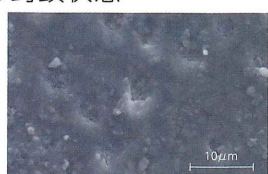


塗布直後の表面

耐久性

条件：50℃：人工唾液浸漬、1ヶ月後・3ヶ月後

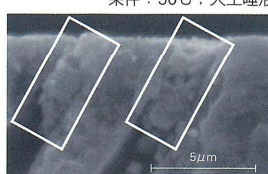


50℃・1ヶ月後

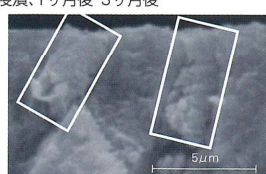

50℃・3ヶ月後

(%) 象牙細管封鎖性(封鎖率)^{※1}

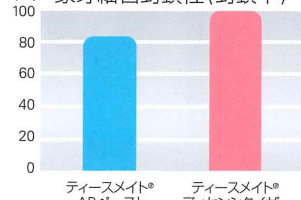

〈測定条件〉 クラレノリタケデンタル株式会社測定 SEM観察、牛歯象牙質 #10000研磨・3% EDTA処理後^{※2}に本材を30秒間×1回塗り塗布。
※知覚過敏モデル作成のため、EDTA処理を歯面に処理しています。

〈測定条件〉
クラレノリタケデンタル株式会社測定
牛歯象牙質、3% EDTA処理後^{※2}に塗布。
塗布方法：
ティースメイト® APペースト 20秒×1回塗り塗布
ティースメイト® ディセンシタイザー 30秒×1回塗り塗布
※1 測定条件によって値が異なります。
※2 知覚過敏モデル作成のため EDTA処理を歯面に処理しています。

知覚過敏抑制のメカニズム

エナメル質


象牙質

象牙細管

歯髄



こすり塗りだけでどうして
知覚過敏の抑制になるの？

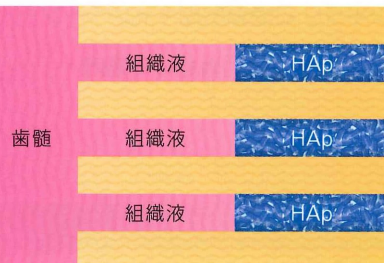

刺激

ポイントは「リン酸カルシウム技術！！」

ティースメイト® ディセンシタイザーは開口した象牙細管を封鎖するタイプの知覚過敏抑制剤です。封鎖物(粉)は促進剤(液)と混和することでハイドロキシアパタイト(HAp)になり抑制効果を得られます。なお封鎖物は「歯周象牙質と同一のアパタイト結晶に転化し、管周及び管間象牙質のアパタイト結晶と一体化している」との報告があります。

※1 千葉 敏江, 山本 雄嗣, 下田 信治, 桃井 保子: リン酸カルシウム系ペーストの歯質ケア材としての有用性 日歯保存誌 58 (3): 201-211, 2015



優れた生体親和性

こすり塗りで物理的に封鎖

る“新しいカタチ”

ティースメイト® ディセンシタイザー活用例

生活歯形成後の処置に ～形成象牙質にも処置が可能。セメントの接着力はそのまま～


ティースメイト® ディセンシタイザーは湿潤下でも問題なく使えるため、浸出液がある場合でも、知覚過敏抑制のため形成後に塗布できます。さらに、被膜もできないので、テンポラリークラウンを装着しても浮き上がりの心配もありません。




形成象牙質(合着前)

■接着性・接着耐久性はほぼ同等!<レジンセメントを併用した場合>
形成象牙質の処置後に接着材料を併用しても、接着強さはほとんど変わりません。

37℃水中1日後

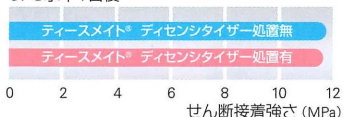

サーマルサイクル 3000回負荷後

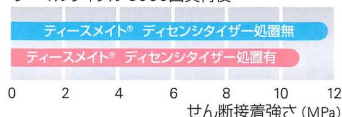

〈測定条件〉
クラレ/リタケデンタル株式会社測定
セメント/リナビア® F 2.0
牛歯象牙質 #1000研磨面
被着面積: 3mm²
※本データは臨床使用時とは異なる条件で測定したものです。

歯石除去後の処置に ～歯がしみないから、患者さんの負担を軽減～

歯石を除去すると象牙質が露出し、知覚過敏が発生しやすくなる場合があります。スクレーピングやルートプレーニング後にティースメイト® ディセンシタイザーを歯肉溝に塗布すると知覚過敏を抑制できます。



歯肉溝に
アプリケーターブラシで塗布

歯間ブラシによる塗布

付属のアプリケーターブラシだけでなく、さまざまな器具で、塗布できるのもポイント!

平滑面



歯周ポケット・歯頸部・窩洞*



歯間



※ティースメイト® APペーストは非該当

酸蝕症の処置に

広範囲の症状でも、スムーズにこすり塗りによる処置が可能です。詳しくは動画をご確認ください。後半部の「プロケア」で操作方法をご紹介します!



<https://www.youtube.com/watch?v=ufrdJ85DwJg>



あなたのデンタルライフを彩るメディア



チャンネル登録数
18,000名達成!

2024年3月現在