

クラレノリタケデンタル 支台築造キャンペーン

[実施期間] 2024.5.21>>>6.20 **数量
限定**

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、『クラレノリタケデンタル支台築造キャンペーン』を企画いたしました。
期間中、下記対象商品を **特別価格** にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

お得な3本パック!!

クリアフィル® DCコア オートミックス ONE
デンチン バリュースキット (3本パック)

■標準価格 各25,500円 202420947

■内容 Aペースト 8.9g(4.5mL) Bペースト 9.0g(4.5mL) 3本 / ミキシングチップ 20個 / ガイドチップ(太) 10個 / ガイドチップ(細) 10個



特別価格にてご提供!!

販売名 クリアフィル® DCコア オートミックス ONE 一般的名称 歯科用支台築造材料
医療機器認証番号 223ABBZX00086000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

歯科根管用ポスト成形品

クリアフィル® AD ファイバーポスト II

各10本入りを ■標準価格 各8,900円 202440240~202440244

■内容 No.2、No.3、No.4、No.5、No.6 各10本



特別価格にてご提供!!

各30本入り(10本入り×3)を ■標準価格 各23,700円 202440250~202440254

■内容 No.2、No.3、No.4、No.5、No.6 各30本



特別価格にてご提供!!

販売名 クリアフィル® AD ファイバーポストII 一般的名称 歯科根管用ポスト成形品 医療機器認証番号 301ABBZX00019000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)




友だち追加は
こちらから

クラレノリタケデンタル LINE公式アカウント

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com

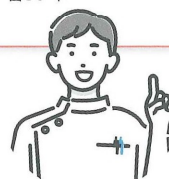

専用ドリル不要!
お使いのピーンリーマーで
ご使用いただけます!!

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタル株式会社もしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2024年5月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

株式会社 松本歯科商会
宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594


支台築造システムのご案内



オートミックスタイプで良好な賦形性
クリアフィル® DCコア
オートミックス® ONE




タッチキュア採用で
根管内でしっかり重合
クリアフィル®
ユニバーサルボンド
Quick ER

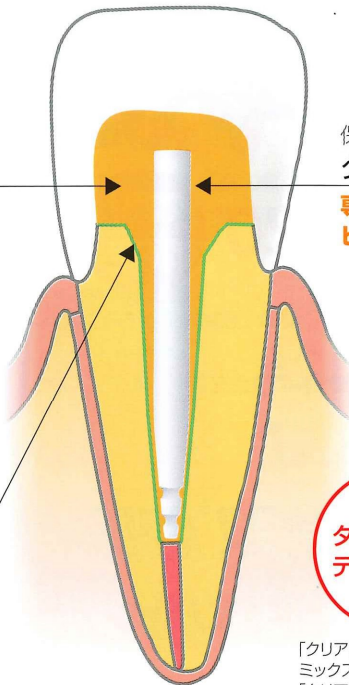

保険適用のファイバーポスト
クリアフィル® ADファイバーポストⅡ
専用ドリル不要!
ピンソリーマーで使用できます。



「クリアフィル®DCコアオートミックス®ONE」と「クリアフィル®ユニバーサルボンドQuickER」が接触すると酸化還元反応により硬化を開始します。

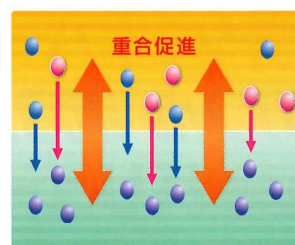

「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER」には、必ず光照射をしてください。
●酸化剤(化学重合触媒)
●新規重合促進剤(化学重合促進剤)
●還元剤(化学重合促進剤)

歯科根管用ポスト成形品


クリアフィル® AD ファイバーポストⅡ の特性

4 mm延長


ポストが長くなったことで、試適時などにピンセットで把持しやすくなりました。

※従来品18mm → 22mmへ延長

クリアフィル®ADファイバーポストⅡ

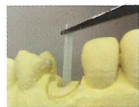


本品の長さが22mmなのでピンセットで把持しやすい!

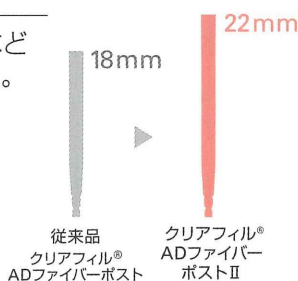


接着性を高める独自形状

当社従来品の特性を継承。根尖部の溝により、機械的な維持力が向上します。

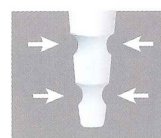

高耐久性

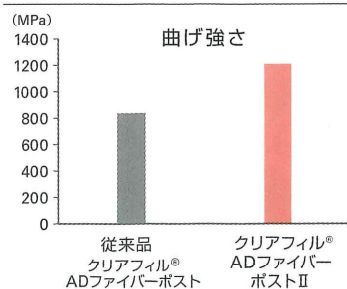

無機フィラー配合によるマトリックス部の強化によって、耐久性向上が期待されます。

測定条件 : JIS T6514 : 2015 6.9曲げ強さ準用 (90℃水中浸漬1週間後)
ポスト径 : No.3
データ測定 : クラレノリタケデンタル株式会社
※測定条件により数値は異なります。

幅広いサイズ



下顎前歯に対応する No.2 (直径 0.84 mm) から No.6 (1.64 mm) をラインナップ。症例に応じた選択可能です。

※形成用ドリルは、ピンソリーマーをご使用ください。

製品の詳細についてはWEBからご確認ください。



X線
造影性

アルミニウム2mm相当以上のX線造影性を有し、試適時の確認や予後の診断に有効

光透過性

光透過性を有し、歯質に近い色調での築造が期待できる

曲げ
弾性率

金属製ポスト※と比較し、象牙質に近似した曲げ弾性率
※「ADポストⅡ」管理医療機器 歯科根管用ポスト成形品
医療機器承認番号 : 20600BZZ01004000

直接法によるレジンコア支台築盛 作成のポイント!



ボンド塗布前にはカタナクリーナーで
根管内清掃して水洗後、しっかりと
乾燥させておきましょう!



ファイバーポスの表面処理をしましょう
シラン処理剤(クリアフィル®セラミックプライマー
プラス)を塗布・エアブローで乾燥させます。



監修：
宮地歯科医院
宮地 秀彦 先生



1 窩洞への
ボンド塗布

- 根管壁にボンドを塗布するには、スポンジよりも
アプリケーターブラシを使うと、奥まで容易に届きます!



2 ボンドの乾燥

- バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまでマイルドな
エアブローでしっかりと乾燥します。
- エアブローの方向と圧力にも注意!
- 3wayシリンジを用いる場合、エアー内に水分が混じっていない
ことを確認してからエアブローしましょう。



3 余剰ボンドの
除去

- ペーパーポイント等で根管内の余剰ボンドを除去、
再度エアブローで5秒以上乾燥。
- ボンドそのものよりも、上面に遊離した水分などの溶媒を吸わせる
イメージで行いましょう!



4 光照射

- できるだけ至近距離から根管孔に対して垂直に、歯冠修復時
(メーカー規定)よりも照射時間を長めにしましょう。
- 照射器を患歯ギリギリまで近づけられない時は照射器を
高出力モードにしておきましょう!



5 ペーストの填入

- ポスト植立はペースト填入から1分以内で行いましょう。
- ガイドチップ(細)のノズルを用いて、最深部からゆっくり
手前へと引き出しながら、気泡を入れないよう、
一気に全部満たさず徐々に填入します。



CHECK! 根管内深部で
タッチキュア(接触硬化)を
期待する場合、
必ずボンドとペーストは
クラレノリタケデンタル製品
同士の組み合わせを
使いましょう!



6 ポストの固定

- 歯科用ポストを植立し、光照射をして固定します。
- 試適時よりも浮き上がっていないか確認、
挿入時に気泡を巻き込まないように注意しましょう。



7 ペーストの築盛・
光照射

- 少しずつ歯冠部にペーストの積層と光照射を繰り返して、全体
をしっかりと硬化させましょう。
- 歯冠部表面など確実に光照射が可能な部分はフロアブルレジン
(クリアフィル®マジェスティ®ESフロー)を用いることもできます。



8 支台歯形成

※光照射深度以上に築盛した場合は、6分以上静置してから形成してください。

- 形成時にファイバーポストが露出したら、カットバックして再度接着処理後に
レジンで断端を包埋する方が、加水分解によるファイバーポストの劣化を防ぎます!
- できればマージン部の概形形成は支台築造までに済ませておき、築造直後は
余剰ペーストの除去や仕上げ程度にとどめて過剰な応力負荷を控えましょう。