

アルフレックスシリーズ ご愛顧感謝キャンペーン

期間 **2024年5月21日～6月20日** **数量限定**

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、『アルフレックスシリーズご愛顧感謝キャンペーン』を企画いたしました。

期間中、「アルフレックスノーマルセット・ファストセット」「アルフレックスデンチャー」を**特別価格**にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

歯科用アルギン酸塩印象材

アルフレックス ダストフリー

汎用タイプ

ノーマルセット 1kg×5SP

ファストセット 1kg×5SP

■標準価格 23,100円 204510200F～204510200N



販売名 アルフレックス ダストフリー
一般的名称 歯科用アルギン酸塩印象材
医療機器認証番号 218AFBZX00089000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器

歯科用アルギン酸塩印象材

アルフレックス デンチャー

義歯印象に
おすすめ！

粉末 1kg

■標準価格 5,300円 204510201



販売名 アルフレックス デンチャー
一般的名称 歯科用アルギン酸塩印象材
医療機器認証番号 219AFBZX00051000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器

それぞれ

特別価格にてご提供!!

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2024年5月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。

製造販売 **NISSIN**

京都府亀岡市旭町樋ノ口88 〒621-0001

発 売 株式会社 **モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ 0800.222 8020(フリーコール)
<歯科医療従事者様専用>

www.dental-plaza.com

株式会社 **松本歯科商会**

宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594

歯科用アルギン酸塩印象材


ALFLEX DENTURE

アルフレックスデンチャー



義歯印象に
おすすめ！

義歯の一次印象に適したアルギン酸塩印象材です。従来のアルギン酸塩印象材より練和後の粘度が高く、辺縁部の可動粘膜を無理なく押し広げることができるため、広く高精度に印象を採得することができます。粉と水のなじみがよく、練和が容易で、短時間で均一なペーストに仕上がります。高保湿性により印象採得後の寸法安定性に優れています。また、印象採得後の弾性に変化が少なく、口腔内から取り外しやすいです。

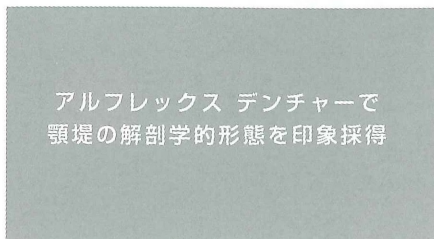

アルフレックス デンチャーで
顎堤の解剖学的形態を印象採得



コシがあり、可動粘膜を無理なく
押し広げてきれいに採得！



一発印象！下顎の舌側遠心まで
きちんと採得できる！



臼後結節、顎舌骨筋線、
外斜線を取り込める！

歯科用アルギン酸塩印象材

ALFLEX DUST FREE

アルフレックス ダストフリー



汎用タイプ

粉と水とのなじみが良く、練り易さを大幅に向上させたアルギン酸塩印象材です。保湿性に優れているため印象採得後の寸法安定性が良好で、弾性に変化が少なく口腔内から取り外す際の患者の負担を軽減します。寒天印象材との接着性も良好で、硬石膏、超硬石膏との相性も良く、滑沢な表面性状の模型が得られます。また、自動練和器での練和（ノーマルセットを冷水で練和）にも適しており、気泡やムラのないペーストに仕上がります。



操作手順



① 20秒～30秒手早く練和します。



② トレーに盛り付けて印象採得します。




③ 流水で洗浄後、余剰水分を除きます。



④ できるだけ速やかに石膏を注入します。

アルフレックスデンチャーとダストフリーの性能

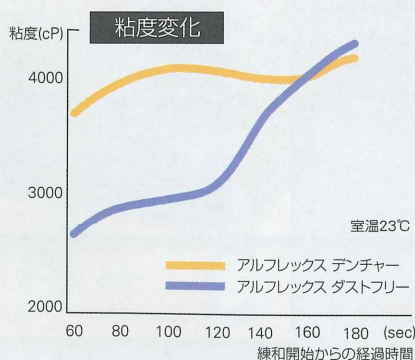

印象操作タイムスケジュール

印象操作タイムスケジュール			
操作時間(練和開始から硬化の始まりまでの時間)			
アルフレックス デンチャー	操作時間 120秒	口腔内保持時間 90秒以上	撤去可能
アルフレックス ダストフリー ノーマルセット	操作時間 100秒	口腔内保持時間 90秒以上	撤去可能
アルフレックス ダストフリー ファストセット	操作時間 80秒	口腔内保持時間 90秒以上	撤去可能
時間(sec)			
室温23℃			

好みの操作時間が
選択できる！

関連製品

剥離型

アルギン酸塩印象材専用剥離材

三菱トレークリーナー Advance 1000mL

- 印象体を溶かさず短時間で柔らかくして剥がせます。
- 液は6倍希釈で繰り返し使用できるので経済的。(実用液1L 1,434円)
- 環境重視廃液クリーン

液の交換目安 約2週間

標準価格 8,600円 202330223

6倍希釈
浸漬時間
1～2時間



石膏印象材保管容器 ゆかちゃんBOX

PUSHボタンを押すだけでワンタッチで開く石膏・印象材用のプラスチック保管容器です。開口部には弾性のあるすり切りがあり、片手でスピーディに計量が行えます。

標準価格 3,650円 202330061

