

株式会社松本歯科商会限定



ハイジーンウォッシュ 新規ご採用キャンペーン

キャンペーン期間 **2024/9/1～2024/9/30**

平素はジーシー製品をご愛用頂き、誠にありがとうございます。
この度、「ハイジーンウォッシュ新規ご採用キャンペーン」を実施します。この機会に是非ご用命ください。

【対象製品】ハイジーンウォッシュ5L 1本と
【キャンペーンセット品】ハイジーンウォッシュ1L 1本
を組み合わせ価格にてご提供！

1本



ハイジーンウォッシュ 酵素系洗浄剤
歯科用器具洗浄剤
希望医院価格：5L1本 14,420円

1本



ハイジーンウォッシュ 酵素系洗浄剤
歯科用器具洗浄剤
希望医院価格：1L1本 3,200円

100倍希釈 5分間洗浄

ハイジーンウォッシュ 酵素系洗浄剤

酵素の力で血液等たんぱく汚れを強力に分解・除去。

- 酵素配合により短時間で強力洗浄
- 器具を錆びや変色から守る防錆剤配合*
- 菌の増殖を抑制する抗菌剤配合
- 器具を傷めず環境に優しい中性タイプ

〈使用方法〉用途に応じ水で希釈液を調整(0.5～2.0%)。
汚染した器具を2～10分浸漬した後、流水ですすいでください。


*スチールに対しては変色の恐れがありますので、使用は避けてください。

※薬液の濃度は1.0%(1Lの水に対し10mL)が推奨ですが、汚れの程度により
0.5～2.0%の範囲で使用可能です。

※洗浄液は最低1日に1回交換してください。

洗浄効果の比較

100倍希釈
(1.0%)
推奨濃度

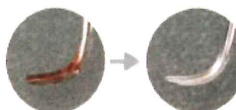

5分間洗浄後
汚れを分解・除去。

200倍希釈
(0.5%)



10分間洗浄後
汚れの程度が軽い場
合は、この濃度でも
効果が期待できる。

条件：スクレーピング後、48時間放置。超音波洗浄器を使用し、20℃で洗浄。