




とことん!!
ユーザーフレンドリー

クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2

サラッとした低粘度の液性状に!

粘度の比較

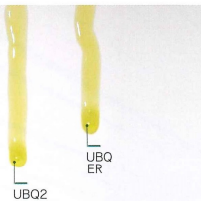

● 窩洞に一筆で満遍なく液がいきわたります

強度を保つためにボンディング材内のフィラー量は維持しながら、サラッとした粘性の低い液性状を実現!



垂れやすい液性状の
動画はここでチェック!

動画ご提供: 東京医科歯科大学 助教 畑山貴志先生

● エアブロー操作が楽々!

マイルドなエアブローで塗布した液面の波打ちがあっという間になくなり、窩底・窩壁に被膜が留まります。



ボンディング操作動画は
ここでチェック!

動画ご提供: 宮地歯科医院 宮地秀彦先生


フィラーが
入っているのに
サッと塗布してスツと
溶媒を飛ばせるって
凄いいね!



● エアブロー操作の役割

プライマー成分に含まれる溶媒を空中に飛ばす
(UBQ2の場合: エタノール)

ボンド層の被膜薄さの調整
(厚すぎず、偏らず、マイルドなエアブローで調整)

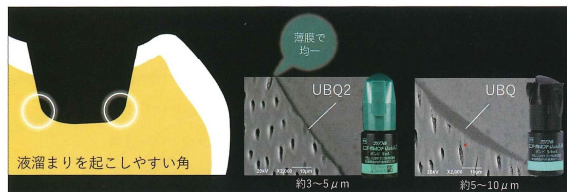

液溜まりを起こしやすい角

海綿で
均一
UBQ2
約3~5 μm

UBQ
約5~10 μm

クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick 2 と クリアフィル®マジェスティ ESフロ- で時短充填の新提案!



歯面処理 - CR 充填完了までの時間比較

ボンド塗布後の待ち時間なしの
1液タイプのボンディング材UBQ2と
色調親和型フロータイプのコンポジットレジンマジェスティ ESフロ-を
使用した術式は、従来のCR充填の術式よりも短時間で仕上げる事が
可能です。是非、動画で時間比較をご確認ください。



歯面処理～CR充填の時間比較の
動画をチェック!

動画ご提供: 東京医科歯科大学 助教 畑山貴志先生



歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)
(歯科用知覚過敏抑制材料)(歯科用シーリング・コーティング材)

クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick 2 切り替え応援キャンペーン

【実施期間】2024.10.21>>11.20 数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。この度、クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick2の新発売を記念いたしまして、
「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick2切り替え応援キャンペーン」を企画いたしました。
期間中、下記対象商品を 特別価格 にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick2



単品1本を

■標準価格 14,070円 202440042
■内容 5mL×1本

クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick2



Wパック1セットを

■標準価格 25,330円 202440043
■内容 5mL×2本

特別価格にてご提供!

特別価格にてご提供!

●UBQ2にはまだまだ特性がいっぱい!製品情報から使い方まで、WEBサイトで情報を掲載!

特設サイトは
こちら



NEW!
室温保存可能になりました!

室温(2~25℃)にて保管可能
「SAルーティング®Multi」「マジェスティ®ESフロ-」と同様に室温保管が可能

一緒に保管
しよう!



診療室内で管理が
完結できるね!

販売名 クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick2 一般的名称 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)(歯科用知覚過敏抑制材料)(歯科用シーリング・コーティング材) 医療機器認証番号 305A8B2X00012000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)
販売名 クリアフィル®マジェスティ ESフロ- 一般的名称 歯科用充填用コンポジットレジン 医療機器認証番号 224A8B2X00170000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)
販売名 SAルーティング®Multi 一般的名称 歯科接着用レジンセメント 医療機器認証番号 230A8B2X00096000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)



クラレノリタケデンタル LINE公式アカウント

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販 売 株式会社 モリタ

大版本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター<歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com

株式会社 松本歯科商会
宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3584