




DENTURE DISK

デンチャーディスク

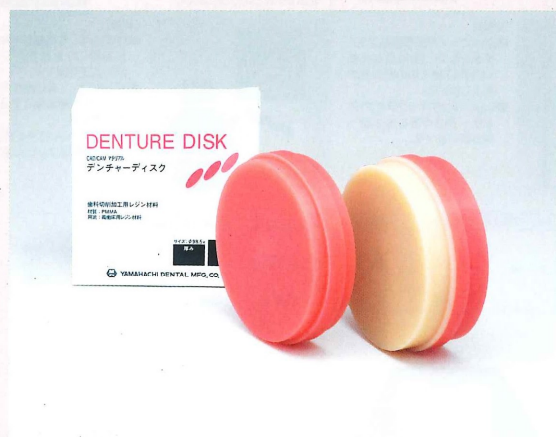

歯科切削加工用レジン材料 デンチャーディスク

薬事情報 | デンチャーディスク
管理医療機器
医療機器認証番号 304AFBZX00046000
歯科切削加工用レジン材料

用途 義歯床用レジン材料

色調 Vピンク

サイズ T25mm・T30mm(φ98.5mm)



標準
価格 **¥6,000**(税別)

色調 Vピンク+A3

サイズ T35mm(φ98.5×35mm)

配色 Vピンク:20mm/A3:15mm



標準
価格 **¥10,000**(税別)



YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.

安定した物性と作業効率の向上

- 理想的な環境条件と適切な材料比率で重合されているため、粉液練和による重合と比較し、安定した物性と品質が得られます。
- デザイン後は加工機によるミリングで工程が自動化されるため、義歯製作の中間作業が簡略化されます。
- データを保管することで、すぐに同形状での再製作が可能です。



作業工程例

維持孔を付与した人工歯※¹、専用プライマー※²、即時重合レジン※³を併用することで、適切な接着強度を得られます。(JIS T6501に適合)

【材料選択】



デザインデータ及び加工データを作成します。用途に応じてディスクとサイズ(厚み)をご選択ください。

【切削加工】



材質はPMMAです。DLCコートのミリングバー※⁴で切削加工を行い、加工後はサポート部分を除去します。

【人工歯接着・固定】



デザインデータで使用する人工歯と加工後の義歯床を、プライマー※²、即時重合レジン※³を用いて接着し固定します。

【研磨・調整】



通法に従い研磨を行います。歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材※⁵のご使用も可能です。

CAD ソフトウェア / CAM ソフトウェアの詳細につきましては、ご購入されておりますメーカー様へお問い合わせください。

関連商品

エフセラ®-A RH ※1

硬質レジン歯・前歯
20200BZZ00105000

管理医療機器
健保適用

形態	上顎 全16形態 S 4・5・6・7 T 4・5・6・7 C 4・5・6・7 SS 4・5・6・7	下顎 全8形態 LA 4・5・6・7 LB 4・5・6・7
色調	A2・A3・A3.5	
包装単位	6歯揃/バー 6歯揃×16枚入(96歯)/箱 全形態セット 6歯揃×24枚入(144歯)/箱	

エフセラ®-A RH ※1

硬質レジン歯・前歯
20200BZZ00105000

管理医療機器
健保適用

形態	上顎 全16形態 S 4・5・6・7 T 4・5・6・7 C 4・5・6・7 SS 4・5・6・7	下顎 全8形態 LA 4・5・6・7 LB 4・5・6・7
色調	A2・A3・A3.5	
包装単位	単品部位ケース 12歯入/箱 トータルケース 各12歯入×6部位(72歯)/箱	

アクリルプライマー ※2

義歯床用接着材料
223AFBZX00101000

管理医療機器

包装単位	25ml
【特徴】	●脱脂後、人工歯基底部に塗布。熱可塑性床用レジン(アクリル・ポリカーボネート系)と人工歯の接着力を高め、レジン歯脱落の不安を低減。 ●流し込み床用レジンと人工歯の接着力向上にも効果があります。 ※人工歯のコンパジット層には接着効果はありません。 ●義歯修理(即重レジン築盛)の前処理液としても有効です。

リファインブライト ※3

急速硬化性常温重合レジン
220AFBZX00069000

歯科用アクリル系レジン
管理医療機器

色調	②ピンク ④LFピンク ⑤クリアー ⑥LFα ⑦マーブルピンク ⑧クリアーピンク ⑨マーブルH A2 A3 A3.5
包装単位	単品: 粉末250g、液材260ml スポイト付

エフセラ®-P RH ※1

硬質レジン歯・臼歯
20200BZZ01490000

管理医療機器
健保適用

形態	28・30・32
色調	A2・A3・A3.5
包装単位	8歯揃/バー 8歯揃×12枚入(96歯)/箱 セット・上顎・下顎

エフセラ®-P RH ※1

硬質レジン歯・臼歯
20200BZZ01490000

管理医療機器
健保適用

形態	28・30・32
色調	A2・A3・A3.5
包装単位	単品部位ケース 20歯入/箱 トータルケース 各20歯入×16部位(320歯)/箱

山ハCAD/CAM ミリングバー DLCコート2 ※4

歯科用研削器材
23B1X10001C09067

一般医療機器

【特徴】

- DLCコートの皮膜厚をプラスすることで、従来品と比較しPMMA加工時の耐久性が向上しました。
- 0.8L(ロングネックタイプ)により、深さのある加工物へ対応が可能です。

種 類	首下長 (mm)	シャンク径 (mm)	全長 (mm)	包装単位
φ3.0mm	16	4	52	1本/ ケース
φ2.0mm	16			
φ0.8mmL	16			
φ0.8mm	12			
φ0.4mm	6		50	

グロッシーコート ※5

歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材
230AFBZX00020000

管理医療機器

有効波長域	365~410nm
硬化時間目安	LEDキアボックス プラス 3分 LEDトラークキア ハイパー-L II 30秒
包装単位	15ml
【特徴】	●耐着色性、耐摩耗性・高接着性を有した光重合レジン表面滑沢硬化材です。 ●伸びが良く、薄く塗布できるため、被膜厚を薄くすることができま。 ●硬化後のべた付きが非常に少なく、作業ストレスを低減します。

※ご注文＆お問い合わせは、お取引ディーラー様にご用命ください。
●ご用命は…

株式会社 松本歯科商会
宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594



製造販売元
山八齒材工業株式会社
〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1
TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764
Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>
E-mail box@yamahachi-dental.co.jp