


ホイップクレンズ

泡の洗浄剤


口腔内装置の毎日のお手入れに！
サッと洗える泡タイプ洗浄剤

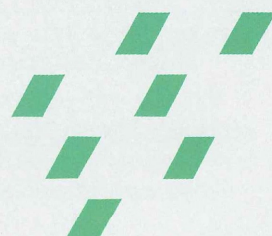

口腔内装置(マウスピース・ナイトガード・矯正用リテーナー・義歯)のお手入れは大切!


お手入れ方法の指導をしていますか?

入れ歯・マウスピース・リテーナー・マウスガードのお手入れで困っていることは?

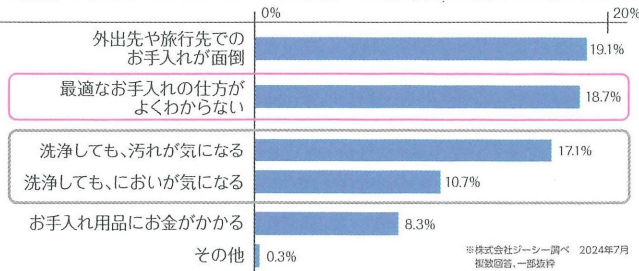

患者さんは
お手入れ方法を知らなかったり、
汚れやにおいを気にしている

きちんとお手入れをしないと...

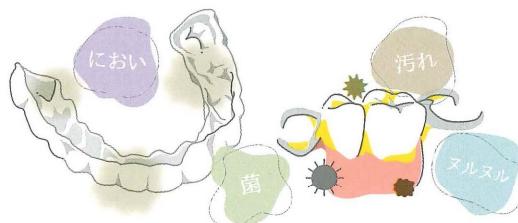

プラークや菌が堆積します



キレイに
みえても




プラークが
ついている

※プラークチェックジェル BRで染め出し

ホイップクレンズでやさしく清潔

60秒で99.9%除菌※

ホイップクレンズの除菌効果

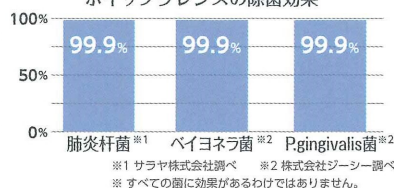

汚れに密着するホイップ泡



きめ細かく
垂れにくい

研磨剤無配合



試験前

株式会社ジーシー試験結果

<試験条件>
アクロンを#2000で研磨した面に200g圧で60秒間ブラッシングを行い、
ブラッシング後の表面性状を光学顕微鏡にて確認。



歯みがきペースト
+
義歯ブラシ
(ブラディカデンチャーブラシ)



ホイップクレンズ
+
義歯ブラシ
(ブラディカデンチャーブラシ)

傷つけにくい

短時間でいつでも簡単キレイ



1 口腔内装置に泡をのせる

使用量の目安

マウスピース ▶ 1プッシュ
部分床義歯 ▶ 1プッシュ

総義歯 ▶ 2プッシュ

※必要に応じて量を調整してください



2 大きめの歯ブラシや
義歯ブラシが
おすすめ



3 やわらかいブラシで
60秒を目安に全体を磨く

使い方を
動画で確認



ご使用に際しては、必ず使用上の注意事項をお読みください。



洗浄後
すっきり!

ミントの香り

泡の洗浄剤 歯科用

ホイップクレンズ

内容量●180ml(約240プッシュ分)



入れ歯洗浄剤(錠剤タイプ)

クリネ

液性●中性

包装●1函:30錠

1函:90錠

販売代理店:株式会社日本歯科商社

販売元:株式会社バイテック・グローバル・ジャパン

日本歯科商社お問い合わせ先

東京本社 03-3625-3111

大阪支店 06-6643-0085

- ・カンジダ菌を99.9%除去
- ・様々な汚れに効果を発揮
- ・幅広い素材に安心して使える

※掲載情報と価格は、2024年11月現在のものです。
※希望医院価格には消費税は含まれておりません。
※製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

発売元 株式会社ジーシー / 製造元 サラヤ株式会社
東京都文京区本郷3丁目2番14号 大阪市東住吉区湯里2-2-8

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ

どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。

