

歯科用色調遮蔽材料

トクヤマ マスキングオペカー

変色・着色
金属色の遮蔽に
これ1本



遮 蔽 性

背景色を効果的にマスキング


金属色・変色部位の遮蔽に



着色を確認



窩底部にトクヤマ マスキングオペカーを塗布・硬化

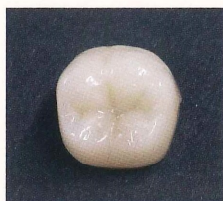

エステライトユニバーサルフロー A2で積層充填



遮蔽材料を使用せず
エステライトユニバーサルフロー A2
のみで充填した場合

用 途		
遮 蔽	充填 (主にデンチン・エナメル)	
トクヤマ マスキング オペカー	エステライト ユニバーサル フロー OPA2	エステライト ユニバーサル フロー A2
高	遮 蔽 性	
0.5mm	1mm	1mm
硬化体の厚み		

窩底部に薄く一層、
背景色を効果的にマスキング

操 作 性

窩底部に馴染むハイフロー

伸びやすくムラがない、
まんべんなく遮蔽



ハイフローの高い塗布性で
窩底部に薄く均一に馴染む

操作ステップ



充填部の歯面清掃後



被着面の材質に応じた処理
※画像はボンドマー ライトレ
ス II で処理




トクヤマ マスキングオペ
カーを充填
※1回の充填厚みは0.5mm以内
とする



光照射後
※800mW/cm以上の光照射器で
20秒を目安に光照射



通法に従いコンポジットレジン
を積層、光照射。硬化後仕
上げ/研磨。

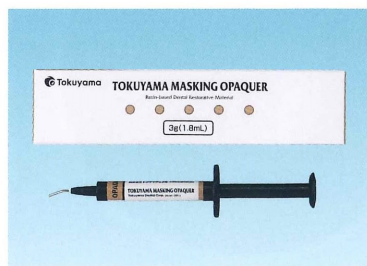

歯科用色調遮蔽材料

トクヤマ マスキングオペカー

(管理医療機器) 認証番号306AFBZX00053000

シリンジ 3g(1.8mL) 1本
トクヤマディスペンシングチップ 2個
樹脂キャップ 2個

標準医院価格 ¥4,700

関連製品

トクヤマディスペンシングチップ



標準医院価格

¥2,500/50個



※このパンフレットの内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。価格は2024年10月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 トクヤマデンタル

インフォメーションサービス

0120-54-1182 受付時間 9:00~12:00,13:00~17:00 (土日祝日を除く)

札幌 (011) 812-5690 仙台 (022) 717-6444 東京 (03) 3835-7201
名古屋 (052) 932-6851 大阪 (06) 6386-0700 福岡 (092) 412-3240

ホームページ <https://www.tokuyama-dental.co.jp>

■ご用命は

株式会社 松本歯科商会

宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594