

期間：11月1日～12月31日

暮れのお掃除キャンペーン

各商品お買い上げの方に、もれなく「ミニタオル」プレゼント！

対象商品：リーベンLスターキット・リーベンL補充ボトル・リーベン

診療室用洗浄・除菌・抗菌クリーナー

診療室用洗浄剤

LEE BEN_L

リーベンL



製品情報サイト



新型コロナウイルスに有効な界面活性剤
ポリオキシエチレンアルキルエーテル（0.2%以上）が含まれています

LEE BEN

リーベン



製品情報サイト



新型コロナウイルスに有効な界面活性剤
塩化ベンゼトニウム（0.05%以上）が含まれています

モノに付着したウイルス感染対策に！

2つのリーベンにはウイルスに有効と判断された界面活性剤が含まれています。
界面活性剤はウイルスの「膜」を壊すことで無毒化するものです。

※厚生労働省・経済産業省・消費者庁「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」NITE検証試験結果より

洗浄・除菌・抗菌が一度にできる

診療室用洗浄・除菌・抗菌クリーナー「リーベンL」は診療室内の医療機器をはじめ設備機器類など広範囲にお使いいただけます。布でふきとるだけで汚れを落とすと同時に診療室各箇所の細菌類・真菌類を除去することができ、また抗菌効果が得られます。

価格：スターキット ¥3,500
補充ボトル ¥3,000

手肌にやさしい強力洗浄剤

診療室用洗浄剤「リーベン」は、診療室内の医療機器をはじめ、設備機器類にいたる広範囲にお使いいただける親水性強力洗浄剤です。古くなって黄ばんだ汚れや錆でも、ピカピカに蘇らせ、清潔で快適な診察室を保持します。

価格：¥3,500



黒カビを除去、抗菌効果もあります



黄ばみ、油汚れにもお使いいただけます

リーベンL / 診療室用洗浄・除菌・抗菌クリーナー

LEE BEN^L

- 特徴** 木・金属・プラスチック・ガラス・その他 等用途および汚れの種類、程度に応じて原液～50倍程度に希釈し使用できます。汚れを落とすと同時に診療室各箇所の細菌類・真菌類を除去することができ、また抗菌効果が得られます。
- 使用法** 木・金属・プラスチック・ガラス・その他汚れに応じて原液～50倍程度に希釈した液を吹付け、布でふきとるだけで細菌を除去することができます。
- 用途**
- ・原液～3倍 換気扇・台所まわりの油污れ等・タイル・ステンレス・白木の柱・ビニールレザー・デコラ板・化粧合板
 - ・3倍～5倍 ユニットまわり・スチール製デスク・ロッカー・電化製品・プラスチック製品
 - ・5倍～10倍 ニス塗り家具・畳・カーペット
 - ・50倍以上 ガラス・鏡

殺菌効果試験結果

試験依頼先 財団法人日本食品分析センター
 試験成績書発行年月日 平成9年7月1日
 試験成績書発行番号 第497040104-001号

試験菌	希釈倍数	菌の生育の有無			
		2.5分後	5分後	10分後	15分後
大腸菌	原液	—	—	—	—
	2	—	—	—	—
	5	—	—	—	—
	10	—	—	—	—
黄色ブドウ球菌	原液	—	—	—	—
	2	—	—	—	—
	5	—	—	—	—
	10	—	—	—	—
サルモネラ	原液	—	—	—	—
	2	—	—	—	—
	5	—	—	—	—
	10	—	—	—	—

試験菌	希釈倍数	菌の生育の有無			
		2.5分後	5分後	10分後	15分後
緑膿菌	原液	—	—	—	—
	2	—	—	—	—
	5	—	—	—	—
	10	—	—	—	—
黒コウジカビ	原液	—	—	—	—
	2	—	—	—	—
	5	+	+	—	—
	10	+	+	—	—
青カビ	原液	—	—	—	—
	2	+	—	—	—
	5	+	+	+	—
	10	+	+	—	—

包装：スターキット（スプレー、補充用500ml）、補充ボトル（500ml）
 成分：非イオン界面活性剤（ポリオキシエチレンアルキルエーテル：0.2%以上）、
 抗菌剤、ポリエチレングリコール他
 液性：弱アルカリ性

【注意事項】
 ※目に入らないよう注意してください。
 ※原則、手指や皮膚に使用しないでください。
 ※飲み込んだり、吸い込んだりしないよう注意してください。

リーベン / 診療室用洗浄剤

LEE BEN


- 特徴**
- ・医療機器に限らず、診療室内の設備機器などのあらゆる物に威力を発揮します。汚れを強力に落とすことは勿論、錆落とし、粘着面の糊落とし、じゅうたんなどのシミ抜きにもお使いいただけます。
 - ・無臭性ですので、使用後はイヤな臭いが残りません。
 - ・手肌にやさしく、荒れません。
 - ・使用後、ベトツキが無くサラッと衛生的です。変色もありません。
- 使用法** スポンジ、布等に水を含ませ、強くしぼってから本品を適量付けて、汚れている部分をこすってください。水分を嫌う物に対しては水を含ませずにご使用ください。汚れを落とした後、乾かない内に乾布で拭いてください。もし、乾いて白く残った時は、軽く水拭きしてください。
- 用途** 医療用機器、診療室内設備機器、キャビネット、ビニールレザー、プラスチック製品、鏡、ガラス（車のフロントガラスの油膜取り、くもり止めにも可）、壁装材、床、家具、電化製品、その他。




ユニットまわり及び、医療機器



OA機器（パソコン、複写機etc）

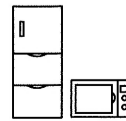

家具・調度品・電化製品

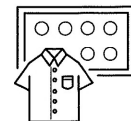

シャツの衿・ジュエタン・
カーペットのシミ抜き

包装：260g
 成分：非イオン界面活性剤（塩化ベンゼトニウム：0.05%以上）、脂肪酸、
 カルナバ、シリコン、溶剤
 液性：中性

【注意事項】
 ※目に入らないよう注意してください。
 ※原則、手指や皮膚に使用しないでください。
 ※飲み込んだり、吸い込んだりしないよう注意してください。

株式会社 松本歯科商会
 宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
 TEL 022-293-3588 / FAX 022-293-3594

本製品に関するお問い合わせ先

製造販売元 **NARCOHM**
ナルコーム

本社・工場 〒384-2107 長野県佐久市蓬田1251-239
 営業所 〒271-0091 千葉県松戸市本町11-5 明治安田生命松戸ビル5階
 TEL. 047-364-7656 FAX. 047-364-7657
 E-mail : info@narcohm.co.jp URL : https://www.narcohm.co.jp