

クリンプロ™ クリア コーティングF 知覚過敏抑制材

新発売キャンペーン

期間：2025年6月2日(月)～7月31日(木)

患部への刺激を考慮した 中性ジェル

患部への刺激を考慮し、
pHを中性としています。
歯面に馴染みやすく
塗布しやすい水性ジェルです。



フッ化物で象牙細管を コーティング

フッ化物とカルシウム、リン酸を
同時配合したコーティング材です。



選べる3種のフレーバー

ミント、ウォーターメロン、ノンフレーバーの
3種類のフレーバーから患者様の
お好みに合わせてお選びいただけます。



各フレーバーが各1本入ったサンプルパックと
組み合わせてご提供します。

内 容 | 50本(0.5ml/1本)

ご注文数

製品番号 | 7200M(ミント)
7200W(ウォーターメロン)
7200FF(ノンフレーバー)

箱
箱
箱


キャンペーン
希望医院価格 | **17,500円**

ご用命は

株式会社 松本歯科商会
宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594

混和皿とブラシが 一体化したパッケージ

個包装で衛生的、処置前の準備や院内在庫の管理も容易です。

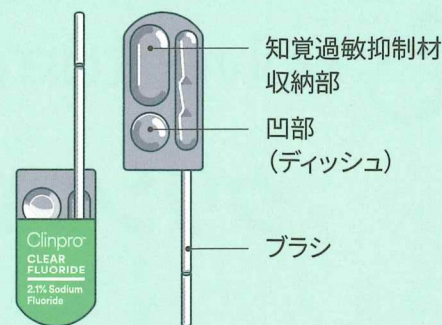

クリンプロ™ クリア コーティング F の使用方法

1. 歯面清掃

通法に従い、歯面清掃を行ってください。

2. 本材の準備



親指と人差し指を用いて、ブリスターの膨らんでいる部分をつぶし、
本材を凹部 (ディッシュ) に絞り出してください。
混和は必要ありません。

3. 塗布



付属のアプリケーターブラシを用いて歯面に塗布してください。
複数回の塗布、こすり塗りは必要ありません。



ブラシヘッドが曲がるので、アクセスしにくい箇所にも塗布できます。

4. 塗布後



水性・乾燥は不要です。



塗布後、15分で飲食可能です。



販売名：クリンプロ クリア コーティング F 認証番号：306AKBZX00048000

※掲載の内容及び希望医院価格は、2025年5月現在のものです。キャンペーン希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。

Solventum およびそのロゴ、その製品名等に使用される商標は Solventum 及びその関連会社の商標です。3M およびそのロゴは 3M およびその関連会社の商標です。その他の商標はそれぞれの権利者の商標です。

 solventum

ソルベンタム合同会社
デンタルソリューション事業部

<https://www.solventum.com/ja-jp/home/oral-care/>

3Mのヘルスケア部門はソルベンタムという独立した企業になりました。

Please Recycle. Printed in Japan.
© Solventum 2025. All Rights Reserved.
DEN-1891-AJ(0525)PN/e.

一般歯科コールセンター

 0120-332-329

9:00～17:00 月～金 (土日祝年末年始を除く)