

グルタラル製剤(化学滅菌剤)



デントハイド®

ご愛用 数量限定 感謝セール

2025 10/21-12/20

平素は格別のお引き立てをたまわり、誠にありがとうございます。
このたび、グルタラル製剤「デントハイド」の数量限定セールを実施いたします。ご愛用いただいている歯科医院様におかれましては、ぜひこの機会をご利用ください。



グルタラル製剤 化学的滅菌・殺菌消毒剤
[医療用器具・機器・装置専用]

デントハイド®

《包装》原液 1200mL・緩衝化剤 360mL

標準価格 10,600円を

特別価格

にてご提供

●デントハイド 関連情報

平成23年 6月17日付け厚生労働省通知「医療機関等における院内感染対策について」より器具の感染対策情報を抜粋してお知らせいたします。

分類	体内の無菌組織や血管系に挿入する器材	粘膜に接触するもの
滅菌法 (消毒法) ※1	滅菌 ・ 高圧蒸気滅菌 ・ 酸化エチレンガス滅菌 ・ 過酸化水素ガスプラズマ滅菌など 化学滅菌剤 ・ グルタラル(デントハイド 該当) ・ 過酢酸	消毒 熱水消毒 (80℃、10分間) 高水準消毒薬 ・ グルタラル(デントハイド 該当) ・ フタラール ・ 過酢酸
対象器具例 ※2	・ 歯周治療用スケーラー ・ 口腔外科用バー ・ 外科用器械 ・ メス刀	・ 歯科用ミラー ・ 再使用可能な印象トレーなど

製品についての
詳しい情報は
こちらから



※1 厚生労働省医政局指導課長通知「医療機関等における院内感染対策について」(平成23年 6月17日医政指発 0617 第1号)

※2 田口正博ほか訳: 歯科医療現場における感染制御のためのCDCガイドライン、メディカ出版、(2004)

ニシカが提案する薬液洗浄消毒システム



1 洗浄

前処理




使用後すみやかに
「ラスノンソニック」
実用液による浸漬洗浄

10分以上浸漬

軽く水洗い

洗浄

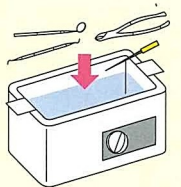


「ラスノンソニック」
実用液による
超音波洗浄

5分以上浸漬
(浸漬洗浄は10分以上)

水洗い


2 滅菌

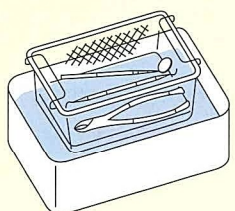

グルタラル製剤
「デントハイド」による
薬液滅菌

1時間以上浸漬
滅菌後、滅菌水で清浄

または

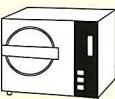

オートクレーブなどによる
加熱滅菌

血液・だ液などの汚れを
強力に分解洗浄

- ・タンパク分解酵素配合
- ・超音波・浸漬洗浄で
高い洗浄効果

片手で計量
簡単・時短!



200倍希釈^{だから}
経済的・コンパクト
★1本で実用液
100L分

歯科用器具防錆除菌清浄液

ラスノンソニック

【包装】500mL (計量キャップ付)/
付替用 500mL×2本 (計量キャップなし)
【別売】実用液調製容器

ウイルス・芽胞・真菌・結核菌・一般細菌など

あらゆる微生物を
化学的に殺滅

- ・低い金属腐食性
- ・加熱滅菌できない器具に

グルタラル製剤
(化学的滅菌・殺菌消毒剤)

デントハイド (医薬品)

【効能・効果】医療器具の化学的滅菌又は
殺菌消毒
【包装】セット (原液 1200mL、緩衝化剤 360mL、
計量カップ 1個)



すぐれた密封性
専用浸漬容器 (別売)

関連製品

歯科用小器具の
消毒・清浄に

- ・即効性、持続性の殺菌効果
- ・すぐれた清浄力
- ・防錆剤配合
- ・低刺激性

歯科用小器具消毒剤 (医薬品)

ラスノンメディカル液

【効能・効果】歯科用小器具の消毒
【包装】1200mL / 3000mL



強力な防錆作用
すぐれた清浄力

- ・歯科用小器具の発錆を防止
- ・付着した汚れおよび殺菌を
洗い落とす

歯科用小器具防錆清浄液

ラスノン

【包装】1200mL



*製品の注意事項等情報につきましては、弊社ホームページ (<https://www.nishika.co.jp/>) をご参照ください。

製品の詳しい情報をご覧ください▶



日本歯科薬品株式会社

●販売店名

株式会社 松本歯科商会
宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594

本社 山口県下関市竹崎町4-7-24 〒750-0025 TEL 083-222-2221(代) FAX 083-222-2220
大阪営業所 大阪市中央区道修町2-6-6 〒541-0045 TEL 06-6222-4090(代) FAX 06-6222-3950
東京営業所 東京都台東区柳橋1-23-4 〒111-0052 TEL 03-5822-5350(代) FAX 03-5822-5351
福岡営業所 福岡市南区大橋1-1-17-403 〒815-0033 TEL 092-559-1621(代) FAX 092-559-1622

お問い合わせ・資料請求は お客様窓口 ☎0120-8020-96 [ホームページ] <https://www.nishika.co.jp/>