



フィジオクリーンプロ

PHYSIO CLEAN PRO

色素用Ⅱ 歯石用Ⅱ


ご愛顧感謝キャンペーン

期間 2025年12月22日～2026年1月20日

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、「フィジオクリーンプロ 色素用Ⅱ・歯石用Ⅱ ご愛顧感謝キャンペーン」を企画いたしました。期間中に「フィジオクリーンプロ色素用Ⅱ1.2L」または「フィジオクリーンプロ歯石用Ⅱ1.2L」を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

歯科院内用 義歯洗浄剤

フィジオクリーン プロ 色素用Ⅱ

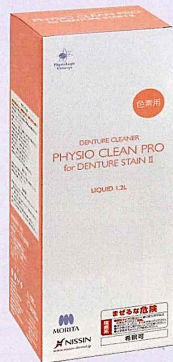


汚れの
除去には！

次亜塩素酸ナトリウムのチカラでヤニなどのガンコな着色汚れやカンジタ菌などを除去。一床あたり最短5分で洗浄が可能。3倍まで希釈して使用できます。

■標準価格 1.2L 4,600円 204530563

歯科院内用 義歯洗浄剤

フィジオクリーン プロ 歯石用Ⅱ

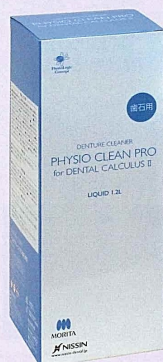

歯石の
除去には！

短時間で歯石除去が可能。歯石用洗浄剤ながら高い洗浄力を合わせもち着色汚れヌメリなどもスッキリ落とします。洗浄時間は5-10分です。歯石やデンチャープラークバイオフィルムやカンジタ菌などを除去します。金属のくすみも除去が可能。

■標準価格 1.2L 4,100円 204530548

いずれか特別価格にてご提供！

義歯だけでなくリテーナーやマウスガードなどにも使用可能です。
＊ティッシュコンディショナーを装着した義歯には使用できません

フィジオクリーンプロ色素用Ⅱの
詳しい情報はこちら！



特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2025年12月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

製造販売 **NISSIN** 京都府亀岡市旭町樋ノ口88 〒621-0001 <http://www.nissin-dental.jp>
発売 株式会社 **モリタ**
大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター＜歯科医療従事者様専用＞ T 0800. 222 8020（フリーコール）
www.dental-plaza.com

株式会社 松本歯科商会
宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594

DENTURE CLEANER

PHYSIO CLEAN PRO

for DENTURE STAIN II

希釈可能



フィジオクリーン プロ 色素用Ⅱ

短時間で義歯を洗浄・除菌！
タバコのヤニや
着色汚れを落とします！

タバコのヤニや着色汚れを落とします。

使用前



タバコのヤニが付着した義歯。

使用中



フィジオクリーンプロ色素用Ⅱと
超音波洗浄器にて10分間洗浄。

使用后



フィジオクリーンプロ色素用Ⅱから取り出し、
すすいだ義歯。着色汚れが除去できています。

ガンコな着色汚れも短時間で除去！

超音波洗浄器で5～10分間洗浄することで、タバコのヤニやガンコな着色汚れを短時間で除去します。当社従来品から洗浄時間を短縮、簡単に洗浄できるようになりました。

※「フィジオクリーンプロ 色素用Ⅱ」で落ちない歯石は、「フィジオクリーンプロ 歯石用Ⅱ」をご使用ください。

次亜塩素酸ナトリウム配合

次亜塩素酸ナトリウム配合で洗浄・除菌効果を発揮し、カンジダ菌やその他細菌を除去します。

希釈して使用できます

義歯の汚れに応じて最大3倍まで希釈して使用できます。
ガンコな汚れの場合は希釈せず原液のままお使いください。

DENTURE CLEANER

PHYSIO CLEAN PRO

for DENTAL CALCULUS II



フィジオクリーン プロ 歯石用Ⅱ

短時間で義歯に付着した
歯石を除去します！

義歯に付着したガンコな歯石を落とします。

使用前



歯石が付着した義歯。

使用中



フィジオクリーン プロ 歯石用Ⅱを超音波
洗浄器にて10分間洗浄。

使用后



フィジオクリーン プロ 歯石用Ⅱから取り出し、
すすいだ義歯。
歯石が除去できています。


短時間の洗浄で歯石を溶解！

超音波洗浄器で5分～10分間洗浄することで、ガンコな歯石を短時間で除去します。
金属を使用した義歯にも問題無くご使用いただけます。

金属のくすみをキレイに除去

金属を使用した義歯は「フィジオクリーン プロ 歯石用Ⅱ」で洗浄することで一度にくすみを除去することができます。


使用方法

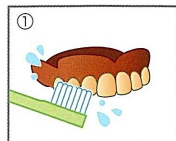

義歯を水ですすいでください。洗浄前にとれる汚れはこの時点でブラシ等を用いて除去してください。



プラスチックまたはガラスの容器に義歯を入れ、汚れに応じて本製品を原液～3倍に希釈したものを、完全に浸かるように注いでください。

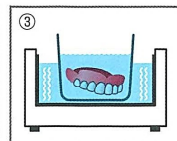

超音波洗浄器にて5～10分間洗浄してください。



義歯を洗浄液から取り出し、ブラシ等を用いて流水で十分にすすいでください。
※強アルカリ性ですので、すすぎは十分にしてください。

使用可能材料

・レジン床義歯 ・金属床義歯
・ノンメタルクラスデンチャー
・矯正用リテーナー
・ナイトガード ・スプリント ・マウスガード

※ティッシュコンディショナーを装着した義歯には使用できません。

製造販売 株式会社ニッシン 京都府亀岡市旭町樋ノ口88 〒621-0001
発売 株式会社モリタ 大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525 東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター ＜歯科医療従事者様専用＞ T 0800. 222 8020（フリーコール）