

SAルーティング® Multi


ハンドミックス



POINT
01 高いコストパフォーマンス!


POINT
02 クリーミーなペースト

必要なペースト量がコントロールできて経済的です。

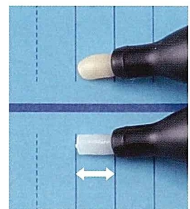

【使用回数】
インレー 約120回
クラウン 約60回
練和紙 1目盛りが
クラウン 1歯分相当

クリーミーなペーストで練和がスムーズに行えます。

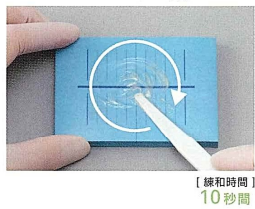

練和紙上に
薄く広げるように※
10秒間練和が
ポイントです!

※薄く広げることで気泡の減少がみられます。




練和の
ポイント動画は
こちら

POINT
03 SAルーティング® Multiは、さまざまな補綴装置と支台歯へ
プライマー処理なしで接着できるレジンセメントです。



X線透射性	あり
被膜厚さ	約16μm
室温保存可能	保管温度2~25℃

※1 試験方法: JIS T8611 条件などにより数値は異なります。
※2 試験方法: JIS T8611 条件などにより数値は異なります。
※3 試験方法: JIS T8611 条件などにより数値は異なります。

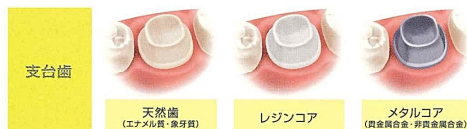

確かなクラレの接着技術



SAルーティング Multi Q & A

Q 装着直前に支台歯・補綴装置がだ液、血液などで
被着面が汚染された場合の処置について

A 処理面が汚染されると接着強さが低下する場合があります。
血液や唾液による汚染を清掃し、乾燥した後に装着ください。

そんな時は!

カテナ® クリーナー

装着操作前に接着阻害因子を清掃し、
併用する接着材料の接着力を向上させる
清掃材です。



カタナ®クリーナーの使い方は
10秒以上こすり塗り後、
水洗・乾燥でOK!



SAルーティング® Multi “ハンドミックス”

ご愛顧感謝キャンペーン

【実施期間】2025.12.22>>2026.1.20 数量限定



平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、
「SAルーティング® Multi “ハンドミックス”ご愛顧感謝キャンペーン」を企画いたしました。
期間中、下記対象商品を 特別価格 にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

SAルーティング®
Multi ハンドミックス
バリューキット1箱を

■内容 Aペースト / Bペースト9.2g(5mL)×3本
■付属品 練和棒(PN)×1、練和紙(目盛付)×1
■標準価格 21,320円 202440200

ユニバーサル

販売名 SAルーティング Multi
一般名 歯科接着用レジンセメント
商品登録番号 230ABZK00090000
医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)



特別価格にてご提供!

関連動画の紹介

Kuraray Noritake Dental Inc.

だいたい5分でわかる
Case & Technique

日常臨床のヒントや材料情報などの動画コンテンツを
ご視聴いただけるサイトがオープンしました。
スキマ時間に視聴しやすい5分程度の動画です。

まずは右記リンク先から
視聴登録ください。



SAルーティング Multiや
クリアフィル ユニバーサル ボンド Quick
クリアフィル マジェスティ ES フロー
の関連動画も公開中
今なら佐藤洋平先生の講演動画
「接着・築造・修復をつなぐ包括的システムアプローチ」も無料公開中!



友だち追加は
こちらから

特別価格のお問い合わせについては、お出りのディーラーまでお願いします。

クラレノリタケデンタル LINE公式アカウント
製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県内市島敷町 2-28 T 959-2653

販売 株式会社 モリタ
大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 T 564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 T 110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222.8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com

株式会社 松本歯科商会
宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594