

ボンドマー ライトレスⅡ

数量限定

2-2パック
キャンペーン

2026.1.21(水) > 2.20(金)

ボンドマー ライトレスⅡ

○単品A液…3mL×2 ○単品B液…2.4mL×2

2-2パック ¥14,800

標準医院価格

※本キャンペーン品はリフィルです。付属品(ミニブラシ・混和皿)は付属していません。

塗布後
待ち時間
なし光照射
なし

「幅広い用途・材質」に「ひとつの操作」で！

ボンドマー ライトレスⅡは、ボンディングとプライマーの機能をあわせもつマルチユース型のボンディング材です。

CR充填時
のボンディング支台築造時
の前処理補綴物・補綴
装置の前処理セメンティング時
の前処理

【使用可能な材質】

■エナメル質 ■象牙質 ■CAD/CAMハイブリッドレジン ■ニケイ酸リチウム ■その他シリカ系セラミックス ■ジルコニア ■アルミナ ■陶歯 ■ファイバーポスト ■ハイブリッド型硬質レジン ■コンポジットレジン ■金銀パラジウム合金 ■コバルトクロム合金 ■チタン合金 ■ニッケルクロム合金 ■ステンレス合金 ■金合金 ■銀合金

材質によらず同一操作

【混和】



【塗布】



【エアブロー】

待ち時間
光照射
0秒

※ボンドマー ライトレスⅡ 歯科用象牙質接着材/歯科セラミックス用接着材料/歯科金属用接着材料(管理医療機器) 認証番号303AFBZX00024000

※一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。※価格は2026年1月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。※数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

ボンドマー ライトレスⅡ 2-2パック キャンペーン 注文書

貴歯科医院名

お名前

ボンドマー ライトレスⅡ
2-2パック キャンペーン

[キャンペーンコード: 15307]

セット

ご住所 〒

お届け歯科商店名

TEL ()

株式会社 松本歯科商会

宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20

TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、ご本人様が拒否された場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社 トクヤマデンタル

本 社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

お問い合わせ・資料請求 インフォメーションサービス

0120-54-1182

受付時間

9:00~12:00/13:00~17:00

(土日祝日を除く)

ミックス
紙 | 責任ある森林
管理を支えています
FSC® C017982

「ボンドマー ライトレスII」は、 さまざまな症例に使用可能な多目的接着材です！

混和 → 塗布 → エアブロー
光照射不要



CR充填

CR充填時のボンディング

写真提供 東京都墨田区 岩崎歯科医院 岩崎圭祐先生



術前



エナメル質へのエッチング
処理、水洗、乾燥後に
ボンドマー ライトレスII 塗布



エアブロー



エステライトユニバーサルフロー
(Medium OPA3) 充填



光照射後



形態修正、研磨後



メタルボンド破折修復

CR充填時のボンディング

写真提供 東京都墨田区 岩崎歯科医院 岩崎圭祐先生



窩洞形成後



ボンドマー ライトレスII 塗布



エアブロー



CR 充填



光照射



術後



ファイバーポストを併用した支台築造

支台築造時の前処理

写真提供 東京都練馬区 マイスター春日歯科クリニック 遠山敏成先生



ファイバーポストに
ボンドマー ライトレスII 塗布、
エアブロー



根管内に
ボンドマー ライトレスII 塗布、
エアブロー



エステコア
ハンドタイプ ペースト 填入



ファイバーポスト挿入、
光照射



レジン築造



光照射、支台歯形成後



CAD/CAMハイブリッドレジンインレーの装着

セメンティング時の前処理

写真提供 東京都墨田区 岩崎歯科医院 岩崎圭祐先生



術前



補綴物に
ボンドマー ライトレスII 塗布、
エアブロー



口腔内被着面に
ボンドマー ライトレスII 塗布、
エアブロー



補綴物に
エステセムII ペースト 塗布、圧接



余剰セメント除去後、
最終光照射



術後



金属床のリライニング

補綴物・補綴装着の前処理

写真提供 歯科佐藤 横浜鶴見 佐藤洋平先生



被着面全体を
サンドブラスト処理



金属部分に
ボンドマー ライトレスII 塗布、
エアブロー



レジン面に
リライニング用接着材塗布



リライニング材塗布、圧接



研磨後

歯科医療従事者向け 情報サイト +TD



接着修復についての 動画を閲覧できます！

下記動画は歯科情報サイト「+TD」へご登録(無料)いただくことで閲覧可能となります。
「+TD」では動画以外にも記事、セミナー情報など様々なコンテンツを掲載しています。

会員登録は
こちらから！



**ジルコニアセラミックスにおける
接着手順**

高垣 智博 先生

朝日大学歯学部 歯冠修復学 非常勤講師/東京科学大学 口腔科学分野 非常勤講師

ジルコニアセラミックスに
おける接着手順
高垣 智博先生



**From Bond
to Beauty**

接着からはじまる審美治療

スウェーデンデンタル株式会社 総務 桜橋 先生

接着からはじまる
審美治療
柿内 裕輔先生

