

高強度でしなやか 光透過性の高いファイバーポスト

Tokuyama

トクヤマFRポスト

30本入
1本あたり約593円!

\\ THANK YOU //

春の感謝
キャンペーン

数量限定/

2026年
2/24(火)
3/19(木)



片手で簡単に開閉できるワンタッチキャップを採用し、
使いやすさがさらに向上しました!



φ1.0mm φ1.2mm φ1.4mm φ1.6mm

各30本入りからお選びください

トクヤマFRポスト 歯科根管用ポスト成形品 (管理医療機器) 認証番号21700BZY00556000

※一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。※価格は2026年2月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。※数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

歯科根管用ポスト成形品

トクヤマFRポスト (30本)

保険適用

標準医院価格 ¥17,800



期間限定販売品

FRポスト収納ケース

標準医院価格 ¥700

特別セットにしてご提供!

4種類の
ファイバーポストを
整理して
収納できます

※特別価格につきましては、お届け歯科
商店様へお問い合わせください。



トクヤマFRポスト(30本) + 収納ケースキャンペーン 注文書

トクヤマFRポスト1.0mm(30本) +収納ケースキャンペーンセット キャンペーン品コード[34693]	セット	トクヤマFRポスト1.2mm(30本) +収納ケースキャンペーンセット キャンペーン品コード[34694]	セット	トクヤマFRポスト1.4mm(30本) +収納ケースキャンペーンセット キャンペーン品コード[34695]	セット	トクヤマFRポスト1.6mm(30本) +収納ケースキャンペーンセット キャンペーン品コード[34696]	セット
---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

貴歯科医院名

お名前

ご住所 〒

TEL ()

お届け歯科商店名

株式会社 松本歯科商会
宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594

株式会社トクヤマデンタル

お問い合わせ・資料請求
インフォメーションサービス

0120-54-1182

受付時間

9:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日を除く)


Webにもいろいろ情報載っています!!

トクヤマデンタル


検索

●札幌TEL011-812-5690 ●仙台TEL022-717-6444 ●東京TEL03-3835-7201 ●名古屋TEL052-932-6851 ●大阪TEL06-6386-0700 ●福岡TEL092-412-3240

トクヤマFRポストは、**緻密なグラスファイバー**が**マトリックスレジン**で**強固に束ねられており**、**高強度**であるとともに**しなやかな物性**です。

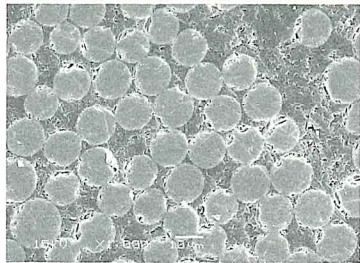


横断面(拡大)

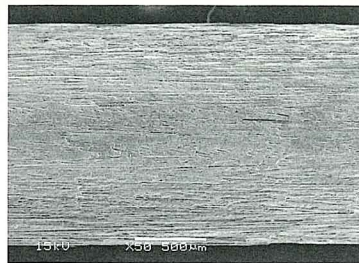


表面(拡大)

高い光透過性

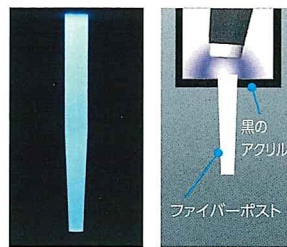

光透過性が高く、光が届きにくい根管内の光硬化型コア用レジンの硬化促進が期待できます。

X線造影性

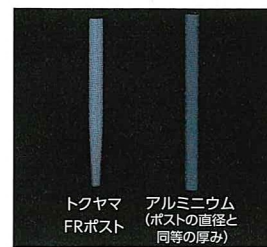

同じ厚みのアルミニウム以上のX線造影性がありますので、試験時の位置確認が容易です。

トクヤマFRポスト表面は必ずシラン処理を施してください。

ファイバーポストの 表面処理



ボンドマー ライトレスⅡなら、
ファイバーポストのシラン処理だけでなく、
ポスト孔の歯面や支台歯、
補綴物の被着面の前処理にも
使用できます！

塗布後の
待ち時間
ゼロ

光照射
ゼロ

レジンコア築造時の前処理




歯質・補綴物 被着面の処理



エステコア ハンドタイプ 歯科用支台築造材料 (管理医療機器) 認証番号230AFBZX00052000
エステコア 歯科用支台築造材料 (管理医療機器) 認証番号225AFBZX00068000
エステセムⅡ 歯科接着用レジンセメント (管理医療機器) 認証番号228AFBZX00129000

操作手順 (ファイバーポストレジジンコア) (「ボンドマー ライトレスⅡ」、「エステコア」を使用した場合)

【写真提供】東京都墨田区 岩崎歯科医院 岩崎圭祐先生

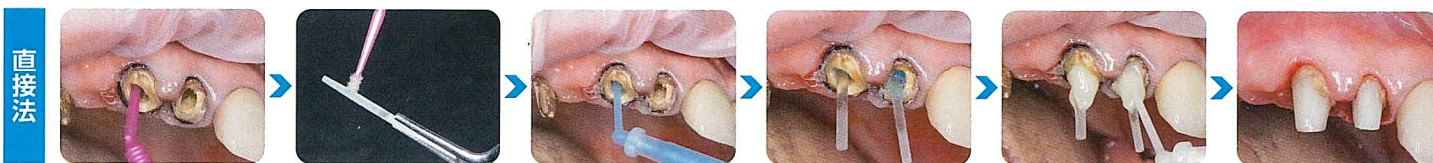

ポスト孔にボンドマー ライトレスⅡ塗布、エアブロー

トクヤマFRポストにボンドマー ライトレスⅡ塗布、エアブロー


根管部にエステコアペースト(ブルー)填入

トクヤマFRポスト挿入、光照射

歯冠部にエステコアペースト(ユニバーサル)填入

光照射、支台歯形成後

【写真提供】神奈川県横浜市 歯科佐藤 横浜鶴見 佐藤洋平先生

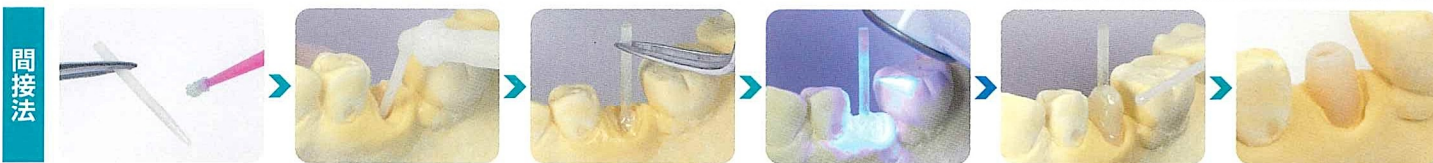

トクヤマFRポストにボンドマー ライトレスⅡ塗布、エアブロー

ブロックアウト、分離材塗布後、エステコアペースト填入

トクヤマFRポスト挿入

光照射

ペースト築盛、光照射

形態修正後