

XP2シリーズ 発売記念キャンペーン

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「アメリカンイーグル XP2シリーズ 発売記念キャンペーン」を実施いたします。
是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

【キャンペーン期間】 2026.2.24 ▶ 4.20 【数量限定】

New

キャンペーン期間中、アメリカンイーグル XP2、
アメリカンイーグル XP2 ProThinを

特別価格

でご提供!


対象製品の詳細は裏面をご覧ください

エックスピーツ

XPからXP2への進化 XP2シリーズで治療をもっと軽やかに

XP2はブレードの切れ味・鋭さが向上したことで、試験片の切断に必要な力が約37%低減。(CATRA試験)
切れ味が向上したXP2でのスクレーピング・ルートプレーニングは、歯石を落とすときの力が低減され、
結果的に術者の疲労・負担や、患者さんの不快感の軽減に繋がると考えられます。

◆ブレードの鋭さに関する比較試験 (n=10)

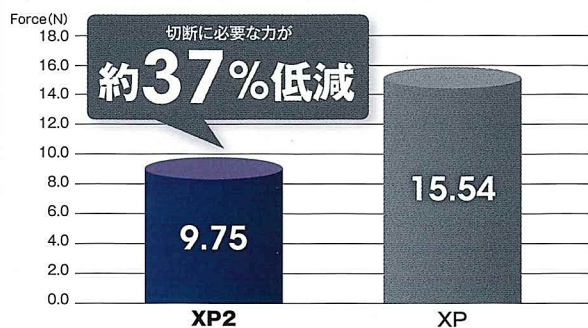

Cutlery & Allied Trades Research Association試験データ

試験方法: REDS (Razor Edge Durability and Sharpness) 機器を使用し、ブレード先端で
定速 (0.1mm/s) にて試験片を切断したときの力を測定する。

スクエアード テクノロジー
SQUARED Technology
(研磨技術)

&
プラズマフュージョン
(特殊加工)

SQUARED Technologyとプラズマフュージョンにより、
滑らかで **耐久性が高く**、
シャープニング直後のような **切れ味が持続**します。

シャープニングフリーのメリット

1 シャープニングの
時間と労力を低減

2 正しい形状のまま
切れ味よく使用可能

※XP2シリーズはシャープニングを行うことができません。

ブレードの耐久性試験

試験方法: 牛歯のエナメル質に100gの圧をかけて25mm幅でストローク。

ステンレススチールのブレード
1,500回のストローク



※アメリカンイーグル社データ

XPテクノロジーのブレード
15,000回のストローク



対象製品一覧・ご注文は裏面へ!

グレイシーキュレット

※Xハンドルは形態別に色調が決まっています。

グレイシーキュレット (G)			グレイシーアクセス (GA)			グレイシーディープポケット (DP)		
ブレードタイプ	XP2		ブレードタイプ	XP2	XP2 ProThin	ブレードタイプ	XP2	
ハンドルタイプ	3/8インチ (X) イーグルライト [®]	ご注文数	ハンドルタイプ	3/8インチ (X) イーグルライト [®]	3/8インチ (X) イーグルライト ProThin [®]	ハンドルタイプ	3/8インチ (X) イーグルライト [®]	ご注文数
G1-2 [前歯部]			GA00-0 [前歯部]			G1-2DP [前歯部]		
G3-4 [前歯部]			GA1-2 [前歯部]			G3-4DP [前歯部]		
G5-6 [前歯部]			GA3-4 [前歯部]			G5-6DP [前歯部]		
G7-8 [臼歯部]			GA5-6 [前歯部]			G7-8DP [臼歯部]		
G9-10 [臼歯部]			GA7-8 [臼歯部]			G11-12DP [臼歯部 (近心)]		
G11-12 [臼歯部 (近心)]			GA11-12 [臼歯部 (近心)]			G13-14DP [臼歯部 (遠心)]		
G13-14 [臼歯部 (遠心)]			GA13-14 [臼歯部 (遠心)]			G15-16DP [臼歯部 (近心)]		
G15-16 [臼歯部 (近心)]			GA15-16 [臼歯部 (近心)]					
G17-18 [臼歯部 (遠心)]								

希望医院価格 ● XP2 (X) イーグルライト 1本 各¥7,900
● XP2 ProThin (X) イーグルライト 1本 各¥7,900

グレイシー
キュレットの
3つの形状

グレイシーキュレット (G) の形状


スタンダードタイプ

歯周用キュレット XP2 グレイシー キュレット
一般医療機器 13B1X00155000321

グレイシーアクセス (GA) の形状

グレイシーキュレットよりも
第一シャングが3mm長く、
ブレード長が半分
(深い歯周ポケットや
狭い根面・根分岐部に有効)歯周用キュレット XP2 グレイシー アクセス
一般医療機器 13B1X00155000319

グレイシーディープポケット (DP) の形状

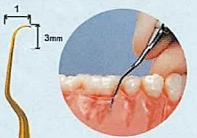グレイシーキュレットよりも
第一シャングが3mm長い
(5mm以上の深い
歯周ポケットや根面に有効)歯周用キュレット XP2 グレイシー ディープポケット
一般医療機器 13B1X00155000320

シクルスケーラー

※Xハンドルは形態別に色調が決まっています。

ブレードタイプ	XP2		XP2 ProThin		ブレードタイプ	XP2		XP2 ProThin	
ハンドルタイプ	3/8インチ (X) イーグルライト [®]	ご注文数	3/8インチ (X) イーグルライト ProThin [®]	ご注文数	ハンドルタイプ	3/8インチ (X) イーグルライト [®]	ご注文数	3/8インチ (X) イーグルライト ProThin [®]	ご注文数
204S [臼歯部]					J4-U5 [前歯部]				
204SD [臼歯部 (遠心)]					M23 [前歯部・臼歯部共用]				
ブラックジャック [前歯部・臼歯部共用]									
H5-33 [前歯部]									
H6-7 [前歯部]									

希望医院価格 ● XP2 (X) イーグルライト 1本 各¥7,900
● XP2 ProThin (X) イーグルライト 1本 各¥7,900

歯科用スケーラ XP2 スケーラー 一般医療機器 13B1X00155000318

貴院名

ご住所 〒

TEL

(

)

お取引販売店

ご担当者

様

関連製品

テストスティック

スケーラーやキュレットの刃部の鋭利さを確認するためのスティックです。
包装・希望医院価格●1本入 ¥720 6本入 ¥3,520

使用方法

インスツルメントの第一シャングをテストスティックに平行にし余分な力を
入れず軽く圧をかけます。この時インスツルメントは引きません。

	第一シャングのエッジがテストスティックに	
	食い込むような引っかかり感がある (鋭利なカッティングエッジ)	かみ合わず表面を滑ってしまふ (鈍なカッティングエッジ)
ステンレススチール	使用可能	シャープニング
XP2シリーズ	使用可能	買換え時期

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー

支店 ●東京 (03) 3813-5751

●大阪 (06) 4790-7333

営業所 ●北海道 (011) 729-2130

●東北 (022) 785-8040

●名古屋 (052) 757-5722

●九州 (092) 441-1286

ご用命は

株式会社 松本歯科商会

宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20

TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594